


rossmax

Model: **GB** serija

rossmax

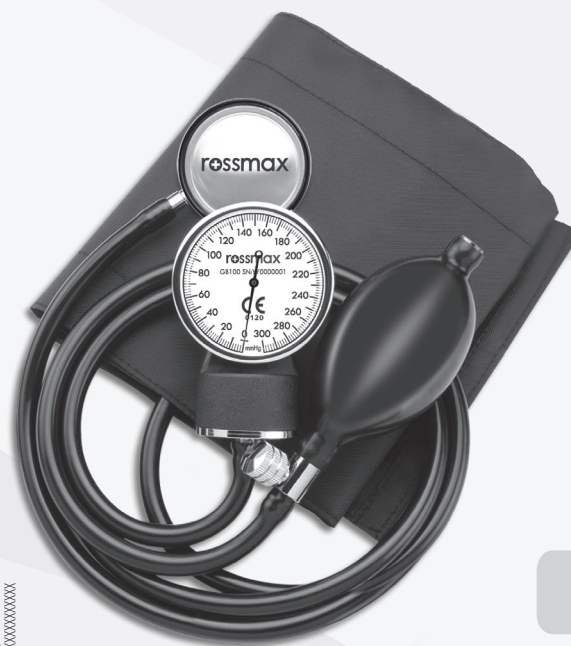

GB101
GB102
GB111
GB112

HR

Korisnički priručnik

www.rossmax.com

Wenzhou Kangju Medical Instrument Co., Ltd.
81 Liuzhai Luodong South Street, Yongzhong 325000 Wenzhou, Zhejiang, China
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

ISO 9001
13485 0123
OBM JB GBseries
V9_K1_ver2315
XXXXXXXXXXXX

Upozorenja

1. Uređaj sadrži dijelove visoke preciznosti. Stoga, izbjegavajte ekstremne temperature, vlažnost i direktnu sunčevu svjetlost. Izbjegavajte padanje ili trešnju uređaja i zaštitite ga od prašine.
2. Djeca ne bi smjela upravljati uređajem kako bi se izbjegle opasne situacije.
3. Aneroidni tlakomjer za kućnu upotrebu ne možete popravljati sami. Nemojte koristiti nikakav alat za otvaranje uređaja i nemojte pokušavati podesiti nešto unutar uređaja. Ako imate problem s uređajem, kontaktirajte ovlaštenog distributera ili proizvođača Rossmax International Ltd.
4. Kako biste zaustavili rad uređaja u bilo kojem trenutku, jednostavno otvorite ventil i na taj način će se manžeta brzo ispuhati.
5. Serijski broj SN:YY00000X možete pročitati na uređaju.

Skladištenje i održavanje

1. Nakon mjerenja omotajte manžetu oko sphigmomanometra i pumpice i pohranite u torbicu zajedno sa stetoskopom.
2. Uvijek u potpunosti ispušite manžetu prije spremanja.
3. Nemojte dirati uređaj s oštrim predmetima.
4. Točnost sphigmomanometra se može pratiti vizualno: pazite da pokazna iglica bude

Napomene

Aneroidni tlakomjer za kućnu upotrebu je u skladu s Europskim zakonima o medicinskim uređajima i nosi CE oznaku "CE 0120".

Kvaliteta uređaja je testirana i potvrđena od strane EC council direktive prema 93/42/EEC (Direktiva o medicinskim uređajima) Aneks I - osnovni zahtjevi i primijenjene usklađene norme.

EN1060-1: 1995/ A2:2009 Neinvazivni sphygmomanometri. Dio 1.: Opći uvjeti

EN 1060-2: 1995/ A1:2009 Neinvazivni sphygmomanometri. Dio 2.: Dopunski uvjeti za mehaničke sphygmomanometre.

Aneroidni tlakomjer za kućnu upotrebu je u skladu s ANSI/AAMI SP-10: 2002. Kako biste osigurali precizne rezultate mjerenja, preporučujemo kalibriranje uređaja svake dvije godine.

O krvnom tlaku

Važno je redovito posjećivati liječnika. Liječnik će Vam reći Vaš normalan raspon krvnog tlaka i što se smatra rizičnim u Vašem slučaju.

Za pouzdanu kontrolu i podatke o krvnom tlaku, preporučujemo voditi dugoročne zabilješke.

Primjena manžete

1. Postavite manžetu na golu —nadlakticu, omotajte s cjevčicom prema dlanu i postavite oznaku za arteriju preko glavne arterije.
2. Rub manžete bi trebao biti otprilike 1.5 do 2.5 cm iznad unutarnje strane laktak. Ako je indeksna linija u rasponu obujma ruke, veličina manžete je prikladna, a u ostalim slučajevima trebate potražiti manžetu drugog obujma.
3. Korištenje manžete ispravne veličine je važno za ispravno mjerenje.

Primjenjivi obujmi manžete

Rossmax manžeta s D-prstenom:

Odrasli 24 - 32cm (9.4" - 12.6")

