

KORISNIČKI PRIRUČNIK
MEDICINSKI ANTIDEKUBITALNI SUSTAV
(madrac s podesivom pumpom)



HF6001

Korisnički priručnik
MEDICINSKI ANTIDEKUBITALNI MADRAC
(madrac s podesivom pumpom)

Načela rada

- Ritmička izmjena različitog pritiska sprječava produljenu kompresiju vaskularnog sustava zbog koje može doći do hipoksije tkiva.
- Izmjenom pritiska madrac se prilagođava pacijentima i njihovom položaju.

Upute za uporabu

Tradicionalno prihvaćena metoda kontrole dekubitusa je redovno okretanje korisnika i praćenje rizičnih područja.

Madrac s izmjeničnim pritiskom namijenjen je kao dodatak takvoj terapiji. Praćenje korisnika i okretanje po potrebi i dalje trebaju biti dio liječenja.

Općenito

- Za pacijente koji provode više od 15 sati dnevno u krevetu.
- Za pacijente koji su klasificirani kao srednjerizični ili visokorizični za razvoj dekubitusa.

Postavljanje / Uporaba

1. Odmotajte madrac.
2. Namjestite ga na krevet.
3. Učvrstite ga za krevet trakama za fiksiranje.
4. Objesite kompresor (pumpu) na okvir kreveta (kod nogu) pomoću kukica.
5. Spojite cijevi madraca na priključak na kompresoru (pumpi) pazeći pritom da ih pravilno umetnete.
6. Spojite kabel električnog napajanja s kompresorom (pumpom).
7. Provedite ga uz krevet do utičnice za madrac i prikopčajte.
8. Pritisnite tipku za uključivanje kompresora (pumpe).
9. Prije namještanja pacijenta na madrac pričekajte da se madrac napuše u potpunosti.
10. Odaberite pritisak prema pacijentovoj morfologiji.

Sigurnosne mjere

- PAZITE pri uporabi ovog električnog uređaja.
- NEMOJTE ostavljati madrac spojen na električnu mrežu ako se ne koristi.
- NEMOJTE izlagati uređaj prekomjernoj vlazi.
- NEMOJTE koristiti korozivne proizvode za čišćenje, kao što su industrijski odmašćivači ili acetatna otapala.
- NEMOJTE pokušavati premjestiti ovaj uređaj dok je spojen na električnu mrežu.

Čišćenje / Dezinfekcija

Kompresor (pumpa):

- PAZITE da odspojite uređaj s električnog napajanja prije čišćenja.
- PAZITE da koristite krpu s blagom otopinom deterdženta.
- PAZITE da slijedite proizvođačeve upute o koncentracijama otopina.
- PAZITE da ne premašite proizvođačeve preporuke vezane uz djelovanje sredstava za čišćenje.

Koristite krpu s blagom otopinom deterdženta ili deterdžent / dezinfekcijsko sredstvo za površine s oznakom CE i pridržavajte se koncentracija za uporabu koje preporučuje proizvođač. Ostavite sredstvo da djeluje onoliko vremena koliko je naznačio proizvođač.

Održavanje

Održavanje kompresora (pumpe) smije obavljati isključivo tehničar kojeg je ovlastio i obučio uvoznik.

Značajke madraca**Specifikacija:**

Maks. težina korisnika: 120-130 kg

Dimenzije madraca: 200 x 90 cm x 7 cm

Materijali : PVC, 0.3 mm

Značajke kompresora (pumpe)**Specifikacija:**

Vrijeme ciklusa: 12 minuta

Izlaz zraka : 5-7 L/min.

Raspon tlaka: 50 ~ 110 mmHg

Električno napajanje : 220-240 V

Zaštita od strujnog udara: razred II

Jamstvo : 12 mjeseci

JAMSTVO

Jamstvo za ovaj proizvod vrijedi dvije (2) godine od dana kupnje. Uvoznik se obvezuje da će tijekom ovog razdoblja uređaj biti besplatno popravljen, odnosno zamijenjen ako kvar nije moguće otkloniti. Ovo jamstvo ne pokriva kvarove uzrokovane nepravilnim korištenjem ili neovlaštenim pokušajem popravka uređaja u jamstvenom roku. Jamstvo ne pokriva potrošne dijelove priložene uz uređaj. Jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama. Jamstvo vrijedi na teritoriju Hrvatske.

DATUM KUPNJE**PEČAT I POTPIS PRODAVATELJA**

Zastupnik za Hrvatsku:
KVANTUM-TIM d.o.o.
Voćarska 6a,
10437 RAKITJE
TEL: 01 3637453,
E-mail: kvantum-tim@kvantum-tim.hr
WEB: www.kvantum-tim.hr

Servis za Hrvatsku:
KVANTUM-TIM d.o.o.
Voćarska 6a,
10437 RAKITJE
TEL: 01 3637453,
E-mail: servis@kvantum-tim.hr
WEB: www.kvantum-tim.hr