




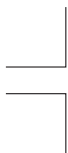

4Neb

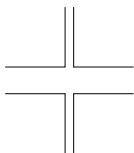

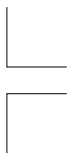

Aerosolni terapijski uređaj

Aerosolni terapijski uređaj za inhalaciju

terapijski uređaj FLAEM sastoji se od kompresorske jedinice (A), raspršivača i nekoliko dodataka (B).

PREDVIĐENA UPORABA

Uređaj za primjenu lijekova putem inhalacije, pomoću inhalacijske terapije i lijekova koje je prepisao liječnik.

INDIKACIJE ZA UPORABU

Liječenje respiratornih bolesti. Lijekove mora propisati liječnik koji je procijenio opće stanje pacijenta.



KONTRAINDIKACIJE

- Medicinski uređaj se NE SMIJE koristiti kod pacijenata koji ne mogu samostalno disati ili nisu pri svijesti.
- Ne koristite uređaj u anesteziološkim ili ventilacijskim krugovima za pomoć pri disanju.

NAMJENJENI KORISNICI

Uređaj mogu koristiti ovlašteno medicinsko osoblje/zdravstveni radnici (liječnici, medicinske sestre, terapeuti, itd.). Uređaj je namijenjen i za kućnu upotrebu.

CILJNA SKUPINA PACIJENATA

Odrasli, djeca svih dobnih skupina, dojenčad. Prije korištenja uređaja, morate pažljivo pročitati korisnički priručnik, a odgovorna odrasla osoba mora biti prisutna tijekom uporabe kod dojenčadi, djece bilo koje dobi ili osoba s ograničenim sposobnostima (npr. fizičkim, mentalnim ili osjetilnim). Medicinsko osoblje mora procijeniti pacijentovo stanje i sposobnosti, kako bi prilikom propisivanja terapije odredili je li pacijent sposoban samostalno i sigurno koristiti inhalator ili ako je potrebna odgovorna osoba za provođenje terapije. Za procjenu uporabe uređaja kod određene vrste pacijenata, poput trudnica, dojilja, dojenčadi, hendikepiranih osoba ili osoba s ograničenim tjelesnim sposobnostima, konzultirajte se s liječnikom.

OKOLINA RADA

Ovaj uređaj namijenjen je korištenju: zdravstvenim ustanovama, poput bolnica, ambulantnih klinika, itd. ili kod kuće.

• UPOZORENJA

- Koristite uređaj samo kao terapijski inhalator. Ovaj medicinski uređaj nije namijenjen za spašavanje života. Bilo koja druga upotreba smatra se neispravnom i može biti opasna. Proizvođač nije odgovoran za neispravnu upotrebu.
- Uvijek se posavjetujte sa svojim obiteljskim liječnikom za određivanje terapije.
- Pratite upute svog liječnika ili terapeuta o vrsti lijeka, doziranju i uputama za liječenje.
- Ako dobijete alergijsku reakciju ili druge probleme tijekom korištenja uređaja, odmah prestanite s upotrebom i konzultirajte svog liječnika.
- Spremite ovaj priručnik za daljnju upotrebu.
- Ako je ambalaža oštećena ili otvorena, kontaktirajte distributera ili servisni centar.
- Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.
- Nemojte držati uređaj blizu izvora topline, na suncu ili u izrazito vrućem okruženju.
- Potrebno vrijeme za prijelaz iz uvjeta skladištenja u radni način iznosi otprilike 2 sata.
- Zabranjeno je otvarati kompresorsku jedinicu na bilo koji način. Popravke smiju izvoditi samo ovlašteni stručnjaci. Neovlašteni popravci poništavaju jamstvo i mogu biti opasni po korisnika.

- **Opasnost od gušenja:**

Neki dijelovi uređaja dovoljno su mali da ih djeca mogu progutati, stoga držite uređaj izvan dohvata djece.

- **Opasnost od gušenja:**

Ne koristite priloženu spojnu cijev i kabele van njihove namijenjene upotrebe, jer postoji opasnost od gušenja. Posebno pripazite djecu i osobe s posebnim potrebama jer ove osobe ne mogu pravilno procijeniti opasnost.

- **Opasnost od požara:**

Ovaj uređaj nije prikladan za uporabu u prisutnosti anestetičke mješavine zapaljive sa zrakom, kisikom ili dušičnim oksidom.

- **Opasnost od strujnog udara:**

- Prije prvog korištenja te periodično tijekom radnog vijeka proizvoda, provjerite cjelovitost strukture uređaja i strujnog kabela kako biste provjerili moguća oštećenja; ako je uređaj oštećen, nemojte ga uključivati nego ga odmah odnesite u ovlaštenu servisnu centar ili prodavaču.

- Držite kabel dalje od životinja (npr. glodavaca) jer takve životinje mogu oštetiti njegovu izolaciju.

- Uvijek držite strujni kabel dalje od vrućih površina.

- Nemojte blokirati otvore za ventilaciju smještene s obje strane kompresorske jedinice.

- Nemojte dirati kompresorsku jedinicu mokrim rukama. Nemojte koristiti kompresorsku jedinicu u vlažnom okruženju (npr. tijekom kupanja ili tuširanja). Ne uranjajte kompresorsku jedinicu u vodu; ako se to dogodi, odmah izvadite utikač iz struje. Ne povlačite niti dirajte kompresorsku jedinicu dok je uronjena u vodu, prvo je isključite. Odmah je odnesite ovlaštenom FLAEM servisnom centru ili prodavaču.

- **Opasnost od neefikasnosti terapije:**

- Učinkovitost može varirati s određenim vrstama lijekova (npr. onima visoke viskoznosti ili u suspenziji). Za dodatne informacije, pročitajte upute na pakiranju lijeka.

- Koristite raspršivač u ispravnom položaju, što je ispravnije moguće; ne naginjite raspršivač pod kutem više od 30 stupnjeva, ni u kojem smjeru, kako biste spriječili curenje lijeka u usta ili prekomjerno raspršivanje, čime se smanjuje učinkovitost tretmana.

- Pazite na upute na lijeku i izbjegavajte uporabu uređaja s nepreporučenim tvarima i otopinama.

- Koristite uređaj samo u okolini bez prašine, inače možete kompromitirati terapiju.

- Ne blokirajte i ne umećite predmete u filter i njegovo kućište.

- Kod pregustih tvari može biti potrebno razrjeđivanje odgovarajućom fiziološkom otopinom, prema liječničkom receptu.

- Koristite samo originalni Flaem pribor ili rezervne dijelove, ograđujemo se od odgovornost u slučaju korištenja neoriginalnih dijelova ili pribora.

- **Opasnost od infekcije:**

- Preporučujemo osobnu uporabu pribora kako biste izbjegli rizik od infekcije.

- Slijedite upute za higijensku pripremu prije svake uporabe. Pazite da se cijevi i pribor ne čuvaju u blizini drugog pribora ili uređaja za različitu terapiju (npr. infuziju).

- Na kraju terapije, ne ostavljajte lijek unutar raspršivača i provedite čišćenje.

- Ako se raspršivač koristi za više vrsta lijekova, ostaci se moraju potpuno ukloniti. Stoga provedite čišćenje nakon svake inhalacije, kako biste održali visok stupanj higijene i optimizirali trajanje i rad uređaja.

- **Opasnost od ozljeda:**

- Ne stavljajte uređaj na mekanu površinu poput kauča, kreveta ili stolnjaka.

- Uvijek ga koristite na tvrdj površini bez ikakvih predmeta.

UPOZORENJA O RIZICIMA INTERFERENCIJE TIJEKOM UPORABE U DIJAGNOSTIČKIM ISPITIVANJIMA

Ovaj uređaj dizajniran je kako bi zadovoljio trenutne zahtjeve elektromagnetske kompatibilnosti. Što se tiče zahtjeva za elektromagnetsku kompatibilnost, elektronički medicinski uređaji zahtijevaju posebnu pažnju tijekom instalacije i uporabe, te ih je stoga potrebno instalirati i/ili koristiti u skladu s uputama proizvođača. Postoji rizik od potencijalne elektromagnetske interferencije s drugim uređajima. Prijenosni ili prijenosni RF radio i telekomunikacijski uređaji (mobilni telefoni ili bežične veze) mogu ometati rad elektroničkih medicinskih uređaja. Uređaj može biti osjetljiv na elektromagnetske interferencije u prisutnosti drugih uređaja koji se koriste za određenu dijagnozu ili liječenje.

POVIJEST KVAROVA I NJIHOVA RJEŠENJA

Prije bilo kakve radnje, isključite uređaj i isključite ga iz struje.

Problem	Uzrok	Rješenje
Uređaj ne radi	Kabel nije ispravno spojen u priključak uređaja ili električnu utičnicu.	Ispravno priključite kabel u utičnicu.
Uređaj ne raspršuje ili slabo raspršuje	Nije stavljen lijev u raspršivač	Stavite pravilnu količinu lijeka u raspršivač.
	Raspršivač nije ispravno sastavljen	Razmontirajte i ponovno sastavite inhalator prema dijagramu sastavljanja na naslovnici.
	Raspršivač je začepljen	Očistite raspršivač. Naslage lijeka su zbog nedostatka čišćenja narušile njegovu učinkovitost i funkciju. Strogo slijedite upute u poglavlju HIGIJENSKA PRIPREMA.
	Dodaci nisu pravilno spojeni na uređaj.	Provjerite jeste li ispravno spojili zračni otvor uređaja i dodatke (vidi dijagram sastavljanja na naslovnici).
	Cijev je savijena, oštećena ili zgužvana	Odmotajte cijev i provjerite je li stisnuta ili probušena. Po potrebi ju zamijenite.
	Filter je prljav	Zamijenite filter
Uređaj je glasniji nego inače	Umetnuti filter	Pravilno umetnite filter u kućište

Ako nakon gornje provjere uređaj i dalje ne radi ispravno, preporučujemo da kontaktirate svog prodavača

ODLAGANJE

Kompresorska jedinica



Sukladno Direktivi 2012/19/EU, simbol na opremi ukazuje da se oprema za odlaganje (isključujući pribor) smatra otpadom i stoga se mora 'posebno odložiti'. Stoga korisnik mora odnijeti ili dostaviti ovaj otpad posebnom centru za odlaganje, kako je uspostavljeno lokalnom vlašću ili ga predati prodavaču prilikom kupnje novog uređaja iste vrste. Pravilno razdvajanje otpada i daljni postupci obrade, popravka i odlaganja potiču proizvodnju opreme od recikliranih materijala i smanjuju negativne okolišne i zdravstvene učinke uzrokovane nepravilnim odlaganjem. Neovlašteno korisničko odlaganje podrazumijeva primjenu upravnih sankcija prema zakonima Direktive 2012/19/EU zemalja članica ili zemlje u kojoj se odlaže proizvod.

Inhalator i dodaci

Odlagati kao komunalni otpad nakon čišćenja.

Pakiranje



Kutija proizvoda



Termo-skupljiva folija za nebulizator i pribor



Cijev pakiranja proizvoda



Vrećica za pakiranje

OBAVIJEST O OZBILJNIM INCIDENTIMA

Ozbiljni incidenti povezani s ovim proizvodom se odmah moraju prijaviti proizvođaču ili nadležnom tijelu. Događaj se smatra ozbiljnim ako uzrokuje ili može uzrokovati, izravno ili neizravno, smrt ili nepredviđeno ozbiljno pogoršanje zdravstvenog stanja osobe.

DRŽAVA	NADLEŽNO TIJELO
Irska	Agencija za regulatorne proizvode u zdravstvu Kevin O'Malley House, Earlsfort Centre, Earlsfort Terrace, IE - Dublin 2 E-mail: devicesafety@hpra.ie
Malta	Jedinica za medicinske uređaje Ljekovita sredstva Sir Temi Żammit Buildings, Malta Life Sciences Park San Ġwann SGN 3000 E-mail: devices.medicinesauthority@gov.mt

SIMBOLI NA UREĐAJU ILI AMBALAŽI



Medicinska oznaka CE sukladno propisu 2017/745 EU i naknadnim ažuriranjima



Uređaj klase II



Prije uporabe: pazite, provjerite upute za uporabu



Uključeno

Prilikom isključivanja jedinice, prekidač zaustavlja rad kompresora samo na jednoj od dvije faze napajanja



Isključeno



Bez ftalata i bisfenola



Broj modela



Temperaturna ograničenja



Ograničenja atmosferskog tlaka



Kód serije



Serijski broj uređaja



Proizvođač



Tip BF primijenjenog dijela



Naizmjenična struja



Pažnja



Pogledajte upute za uporabu



Medicinski uređaj



Ograničenja vlage



Datum proizvodnje



Jedinstveni identifikator uređaja

IP21

Zaštita kućišta: IP21. (Zaštićeno od čvrstih tijela većih od 12 mm. Zaštićeno od pristupa prstom; Zaštićeno od vertikalno padajućih kapljica vode).



INFORMACIJE O OGRANIČENJIMA ILI INKOMPATIBILNOSTI S ODREĐENIM SUPSTANCAMA

- Interakcije: Materijali korišteni u uređaju su biokompatibilni te su usklađeni sa zakonskim propisima, međutim, nije moguće u potpunosti isključiti moguće alergijske reakcije
- Koristite lijek čim ga otvorite i ne ostavljajte ga u inhalatru; nakon završetka terapije, nemojte ostavljati lijek unutar nebulizatora, nego nastavite s higijenskom pripremom.

SPECIFIKACIJE KOMPRESORSKE JEDINICE

Model: P0711EM-1 F400

Napajanje: 230V~ 50Hz 130VA

Maks. tlak: 1.8 ± 0.3 bara

Protok zraka do kompresora: približno 9 l/min

Razina buke (na 1 m): približno 55 dB (A)

Rad: Kontinuiran

Dimenzije: 15(D) x 21(Š) x 11(V) cm

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE RASPRŠIVAČA

Model: RF9-1 RF9 Nebuliser





Minimalni kapacitet: 2 ml

Maksimalni kapacitet: 8 ml

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE UREĐAJA

Model: P0711EM-1 F400 combined RF9-1

Radni tlak (s raspršivačem): 0,65 bara.

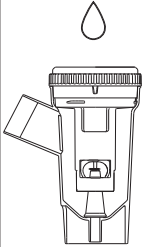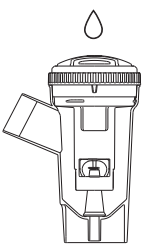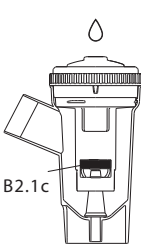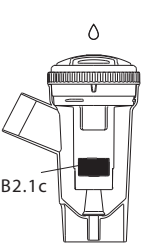DIŠNI SUSTAV	GORNJI DIŠNI PUTEVI	DONJI DIŠNI PUTEVI		
	orofaringealni trakt	Traheobronhijalni trakt	Plućni trakt	Periferni trakt
KONFIGURACIJA RSPRŠIVAČA	Nema selektora	1 Pozicija selektora	2 Pozicija selektora	3 Pozicija selektora
				
MMAD (µm)	7.71 ⁽³⁾	5.12 ⁽¹⁾	3.67 ⁽¹⁾	2.49 ⁽¹⁾
Brzina isporuke (ml/min)	0.53 ⁽²⁾	0.36 ⁽²⁾	0.30 ⁽²⁾	0.23 ⁽²⁾
Respiratorna frakcija < 5 µm (FPF)	26.7% ⁽³⁾	48.8% ⁽¹⁾	63.4% ⁽¹⁾	83.1% ⁽¹⁾
(1) In vitro karakterizacija provedena od strane TÜV Rheinland Italia S.r.l. u suradnji sa Sveučilištem u Parni. Više detalja dostupno na zahtjev. (2) Podaci prikupljeni po internom postupku tvrtke Flaem. (3) Podaci izračunati na temelju vrijednosti dobivenih pomoću Malvern Spraytec-a i uspoređeni s vrijednostima testova provedenih na Sveučilištu u Parni.				

PRIMIENJENI DIJELOVI

Primijenjeni dijelovi tipa BF su: pribor (B3, B4, B5)

Težina: 1,300 kg

UVJETI OKOLINE

Radni uvjeti:

Temperatura: Između +10°C i +40°C

Relativna vlaga zraka: Između 10% i 95%

Atmosferski tlak: Između 69 KPa i 106 KPa

Uvjeti čuvanja i prijevoza:

Temperatura: Između -25°C i +70°C

Relativna vlaga zraka: Između 10% i 95%

Atmosferski tlak: Između 69 KPa i 106 KPa

TRAJANJE

Model: P0711EM-1 F400
(kompresorska jedinica)

Radni vijek: 400 sati.

Model: RF9-1
(Raspršivač i pribor)



Očekivani prosječni radni vijek je 1 godina, međutim preporučuje se zamjena raspršivača svakih 6 mjeseci u slučaju intenzivne uporabe (ili ranije ako je raspršivač začepljen) kako bi se osigurala maksimalna terapijska učinkovitost.

INFORMACIJE O OPREMI I MATERIJALIMA		
Pribor uključuje:		Informacije o materijalima
A -	Kompresorska jedinica - Model: P0711EM-1 F400 A1 – Prekidač A2 – Zračni otvor A3 – Zračni filter A4 – Držač raspršivača A5 – Ručka za nošenje A6 – kabel za napajanje A7 – Odjeljak za pohranu kabela	
B -	Raspršivač i dodaci - Model: RF9-1 B1 – spojna cijev (kompresorska/raspršivačka jedinica) B2 - RF9 Raspršivač B2.1 – Donji dio B2.2 – mlaznica B2.3 – Gornji dio B2.4 - regulator veličine čestica B2.4a - Regulator B2.4b- Ventil B2.4c - Selektor	
	B3 - Usnik s ventilom B3.1 - Izdisajni ventil	Polipropilen
	B4 – Dječja SoftTouch maska	termoplastični elastomeri
	B5 - Za odrasle SoftTouch maska	
C -	Vrećica za dodatke	
	VAŽNA NAPOMENA: Na ambalaži se nalazi identifikacijska naljepnica, uklonite je i zalijepite na predviđena mjesta na 2. stranici. Kod zamjene raspršivača i pribora, napravite isti postupak.	


SASTAVLJANJE INHALATORA

Slijedite upute za sastavljanje u nastavku.


1. Stavite mlaznicu (B2.2) na gornji dio (B2.3).

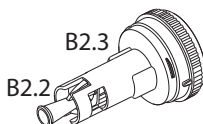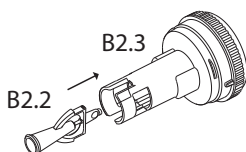


2. Sastavite ventil (B2.4b) s ravnim dijelom prema dolje na regulator veličine čestica (B2.4a), poravnajući rupu s rebrastom pozicijom, zatim do kraja zavrnite selektor (B2.4c) na navojni čep regulatora. Okrenite sastavljeni regulator kako biste provjerili da se selektor može okretati i je li pokretljiv gore-dolje između položaja.

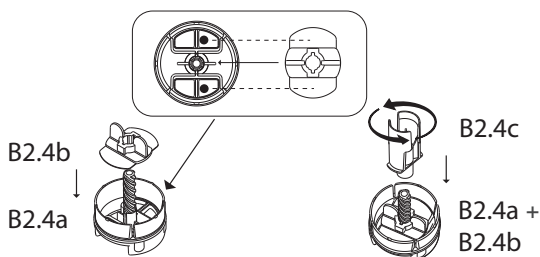

3. Umetnite i pritisnite prethodno sastavljeni regulator veličine čestica (B2.4) sve do kraja, držeći ga u horizontalnom položaju, u gornji dio (B2.3), usklađujući selektorove pregrade (B2.4c) s utorom u gornjem dijelu (B2.3).

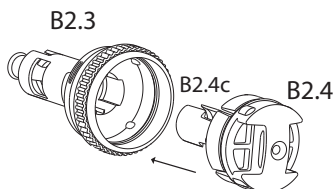

4. Umetnite sastavljeni gornji dio (B2.4 + B2.3 + B2.2) u donji dio (B2.1) i pričvrstite ga okretanjem u smjeru kazaljke na satu.

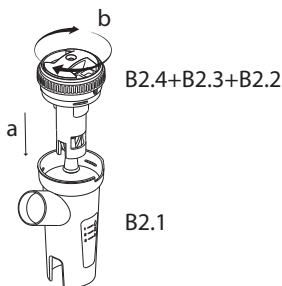

KAKO KORISTITI RASPRŠIVAČ RF9 S REGULATOROM VELIČINE ČESTICA I SUSTAVOM VENTILACIJE


Profesionalan i brz, preporuča se za primjenu svih vrsta lijekova, čak i kod bolesnika s kroničnim bolestima. Sustav ventilacije optimizira doziranje inhaliranog lijeka i ograničava okolno raspršivanje. Osim toga, zahvaljujući regulatoru veličine čestica, veličina čestica može se odabrati na temelju područja dišnog sustava na kojem želite primijeniti lijek. Naime, pomoću 4 dostupna načina, zdjela može raspršiti čestice različitih veličina.

Odaberite željeni položaj pomoću regulatora veličine čestica B2.4.

Okretanjem regulatora u smjeru kazaljke na satu, selektor (B2.4c) se pomiče i zatvara otvor, a otvara kad se regulator okrene suprotno od kazaljke na satu.



Za korištenje posude bez selektora, čvrsto uhvatite tijelo posude, dok drugom rukom okrećete regulator veličine čestica (B2.4) u smjeru kazaljke na satu, sve dok regulator ne izađe iz gornjeg dijela (B2.3).

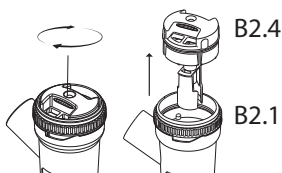

UPUTE ZA UPORABU


Prije svake uporabe temeljito operite ruke i očistite uređaj kako je opisano u odjeljku "HIGIJENSKA PRIPREMA". Tijekom terapije se preporuča adekvatna zaštita od kapanja. Ovaj uređaj je pogodan za primjenu ljekovitih tvari (otopina i suspenzija) aerosolne primjene; prepisane od liječnika. Ako je neka tvar pregusta, potrebno ju je razrijediti odgovarajućom fiziološkom otopinom, prema liječničkom receptu.

1. Umetnite utikač kabela za napajanje (A6) u utičnicu koja odgovara naponu uređaja. Treba ga staviti tako da ga nije teško isključiti iz struje.
2. Ulijte propisani lijek u donji dio (B2.1). Umetnite gornji dio (B2.4 + B2.3 + B2.2) čašice u donji dio (B2.1), zatim zatvorite okretanjem gornjeg dijela (B2.3) u smjeru kazaljke na satu. Zatvorite raspršivač okretanjem gornjeg dijela (B2.3) u smjeru kazaljke na satu.
3. Spojite dodatke prema "Dijagramu sastavljanja" na naslovnici.
4. Namjestite selektor prema željenoj veličini čestica, kako je opisano pod "Kako koristiti raspršivač RF9".
5. Udobno sjednite držeći raspršivač u ruci, stavite usnik na usta ili koristite nosnicu (ako je prisutna) ili masku. Ako koristite dodatak za masku, stavite ga na lice kako je prikazano na slici (s ili bez upotrebe elastične trake).
6. Uključite uređaj pritiskom na prekidač (A1) i duboko udahnite i izdahnite; nakon udisaja, preporučuje se zadržati dah na trenutak kako bi se inhalirane aerosolne kapi mogle slegnuti. Zatim polako izdahnite.
7. Kada završite s korištenjem, isključite uređaj i isključite ga iz struje.



PAŽNJA: Ako se unutar cijevi nakon terapije (B1) stvori nakupina vlage, odvojite cijev od inhalatora i osušite ju pomoću ventilacije kompresora; ovime sprječavate moguće stvaranje plijesni unutar cijevi. Kako biste olakšali sastavljanje sastavne cijevi (B1) s kompresorskom jedinicom, istovremeno okrećučite i umećite njen kraj, a za uklanjanje ga okrećite i izvlačite.


Maske SoftTouch

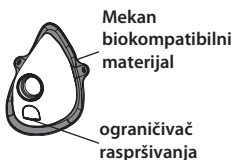

Maske SoftTouch imaju vanjski rub od mekanog, biokompatibilnog materijala koji osigurava optimalno prijanjanje uz lice, a također su opremljene inovativnim ograničivačem raspršivanja. Ove karakteristične značajke omogućuju veću koncentriranost lijeka kod pacijenta te ograničavaju njegovo raspršivanje.



Prilikom udisanja, odjeljak koja djeluje kao Ograničivač raspršivanja savija se prema unutra u masku.

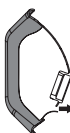

Prilikom izdisanja, kartica koja djeluje kao Ograničivač raspršivanja savija se prema vanjskoj strani maske.

HIGIJENSKA PRIPREMA

Isključite uređaj i odspojite ga iz struje prije postupka higijenske pripreme.

Kompresorska jedinica (A) i vanjski dio cijevi (B1)

Koristite samo krpu namočenu antibakterijskim deterdžentom (neabrazivnim i bez otapala bilo koje vrste).

Raspršivač i dodaci

Kako biste rastavili raspršivač, čvrsto uhvatite tijelo, a drugom rukom okrećite regulator veličine čestica (B2.4) u smjeru kazaljke na satu dok ne iskoči iz gornjeg dijela (B2.3). Zatim možete rastaviti dijelove (regulator B2.4a, ventil B2.4b, selektor B2.4c i gornji dio B2.3) kako bi ih očistili. Nosnik (B2.2) je spojen s gornjim dijelom (B2.3) i može se izvaditi jednostavnim povlačenjem prema van. Zatim slijedite iduće upute.

Čišćenje

Prije i nakon svake uporabe, dezinficirajte očistite raspršivač i dodatke odabirom jedne od navedenih metoda u donjoj tablici te opisane u nastavku.

metoda A: Očistite pribor toplom pitkom vodom (približno 40°C) i blagim deterdžentom za pranje posuđa (neabrazivnim).

metoda B: Očistite pribor u perilici posuđa u vrućem ciklusu (70°C).

metoda C: Očistite pribor uranjanjem u otopinu od 50% vode i 50% bijelog octa, a zatim temeljito isperite toplom pitkom vodom (približno 40°C).

Nakon čišćenja dodataka, snažno ih protresite i stavite na papirnati ručnik ili, alternativno, osušite vrućim zrakom (npr. sušilom za kosu).

Dezinfekcija

Nakon čišćenja raspršivača i pribora, dezinficirajte ih pomoću jedne navedenih metoda u donjoj tablici te opisane u nastavku. Svaku metodu možete izvesti ograničen broj puta (vidjeti sliku u tablici).

metoda A: Nabavite dezinficijens tipa elektrolitskog klorida (aktivni sastojak: natrijev hipoklorit), specifično za dezinfekciju, dostupan u svim ljekarnama. Izvođenje:

Izvođenje:

- Napunite spremnik odgovarajuće veličine u koji stanu svi pojedinačni dijelovi koje treba dezinficirati otopinom pitke vode i dezinficijensa, prema naznačenom omjeru na pakiranju dezinficijensa.
- Potpuno uronite svaki pojedini dio u otopinu, pazite da se ne stvaraju mjehurići zraka. Ostavite dijelove uronjene u otopinu onoliko koliko je naznačeno na pakiranju dezinficijensa, uzevši u obzir odbranu koncentraciju za pripremu otopine.
- Izvadite dezinficirane komponente i temeljito ih isperite mlakom pitkom vodom.
- Bacite otopinu prema uputama proizvođača dezinficijensa.

metoda B: Dezinficirajte pribor kuhanjem u vodi 10 minuta; koristite demineraliziranu ili destiliranu vodu kako biste izbjegli taloženje kamenca.

k crmb_ A8 Dezinficirajte pribor u vrućem sterilizatoru za bočice (ne u mikrovalnoj pećnici). Strogo pratite upute sterilizatora. Kako bi dezinfekcija bila učinkovita, odaberite sterilizator koji ima radni ciklus od barem 6 minuta.

Nakon dezinfekcije pribora, snažno ga protresite i stavite na papirnati ručnik ili, alternativno, osušite vrućim zrakom (npr. sušilom za kosu).


Na kraju svake uporabe, spremite uređaj zajedno s priborom na suho mjesto bez prašine.

Metoda pribor		Čišćenje			Dezinfekcija		
		Metoda A	Metoda B	Metoda C	Metoda A	Metoda B	Metoda C
	B2.1	✓	✓	✓	✓ MAX 300 puta	✓ MAX 300 puta	✓ MAX 300 puta
	B2.2	✓	✓	✓	✓ MAX 300 puta	✓ MAX 300 puta	✓ MAX 300 puta
	B2.3	✓	✓	✓	✓ MAX 300 puta	✓ MAX 300 puta	✓ MAX 300 puta
	B2.4a	✓	✓	✓	✓ MAX 300 puta	✓ MAX 300 puta	✓ MAX 300 puta
	B2.4b	✓	✓	✓	✓ MAX 300 puta	✓ MAX 300 puta	✓ MAX 300 puta
	B2.4C	✓	✓	✓	✓ MAX 300 puta	✓ MAX 300 puta	✓ MAX 300 puta
	B3	✓	✓	✓	✓ MAX 300 puta	✓ MAX 300 puta	✓ MAX 300 puta
	B4	✓	✓	✓	✓ MAX 300 puta	✓ MAX 300 puta	✓ MAX 300 puta
	B5	✓	✓	✓	✓ MAX 300 puta	✓ MAX 300 puta	✓ MAX 300 puta

✓: planirano \: nije planirano

FILTRACIJA ZRAKA

Uređaj ima ekstrakcijski filter (A3) koji se zamjenjuje zamjenskim filterom (D1) kad se zaprlja ili promijeni boju. Ne perite, niti ponovno koristite isti filter. Redovita zamjena filtera je nužna kako bi osigurali ispravni rad kompresora. Filter trebate redovito provjeravati. Za zamjenske filtere se obratite svom prodavaču ili ovlaštenom servisnom centru. Kako biste zamijenili filter, izvucite ga kao što je prikazano na slici. Filter je dizajniran tako da uvijek bude postavljen u svoj nosač. Nemojte mijenjati filter tijekom rada uređaja. Koristite samo originalne Flaem dodatke ili rezervne dijelove, ne odgovaramo za korištenje neoriginalnih dijelova ili dodataka.

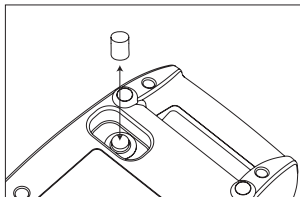

JAMSTVO

Jamstvo za ovaj proizvod vrijedi dvije (2) godine od dana kupnje. Uvoznik se obvezuje da će tijekom ovog razdoblja uređaj biti besplatno popravljen, odnosno zamijenjen ako kvar nije moguće otkloniti. Ovo jamstvo ne pokriva kvarove uzrokovane nepravilnim korištenjem ili neovlaštenim pokušajem popravka uređaja u jamstvenom roku. Jamstvo ne pokriva potrošne dijelove priložene uz uređaj. Jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama. Jamstvo vrijedi na teritoriju Hrvatske.

DATUM KUPOVINE:

.....

PEČAT PRODAVATELJA I POTPIS PRODAVATELJA:

.....

U slučaju reklamacija obratite se na:

Zastupnik za Hrvatsku:

KVANTUM-TIM d.o.o.

Voćarska 6a

10437 Rakitje

TEL: 01 3637453,

FAX: 01 3637581,

E-mail: kvantum-tim@kvantum-tim.hr WEB:

www.kvantum-tim.hr

Servis za Hrvatsku:

KVANTUM-TIM d.o.o.

Voćarska 6a

10437 Rakitje

TEL: 01 3637453,

FAX: 01 3637581,

E-mail: servis@kvantum-tim.hr WEB:

www.kvantum-tim.hr



FLAEM NUOVA S.p.A.
Via Colli Storici, 221/223/225
25015 S. MARTINO DELLA BATTAGLIA
(Brescia) – ITALY
Tel. +39 030 9910168
www.flaem.it

© 2023 FLAEM NUOVA®

All right reserved

Cod. 18830C0 rev. date 03/2023