

NOVAMA®

MultiCheck Pro+

VIŠENAMJENSKI MJERNI UREĐAJ

ANALIZATOR KRVÍ 3 u 1


UPUTE ZA UPORABU

MODEL: BK1-10M


Prije uporabe pažljivo pročitajte ove upute.

Verzija 01.07 19.07.2021

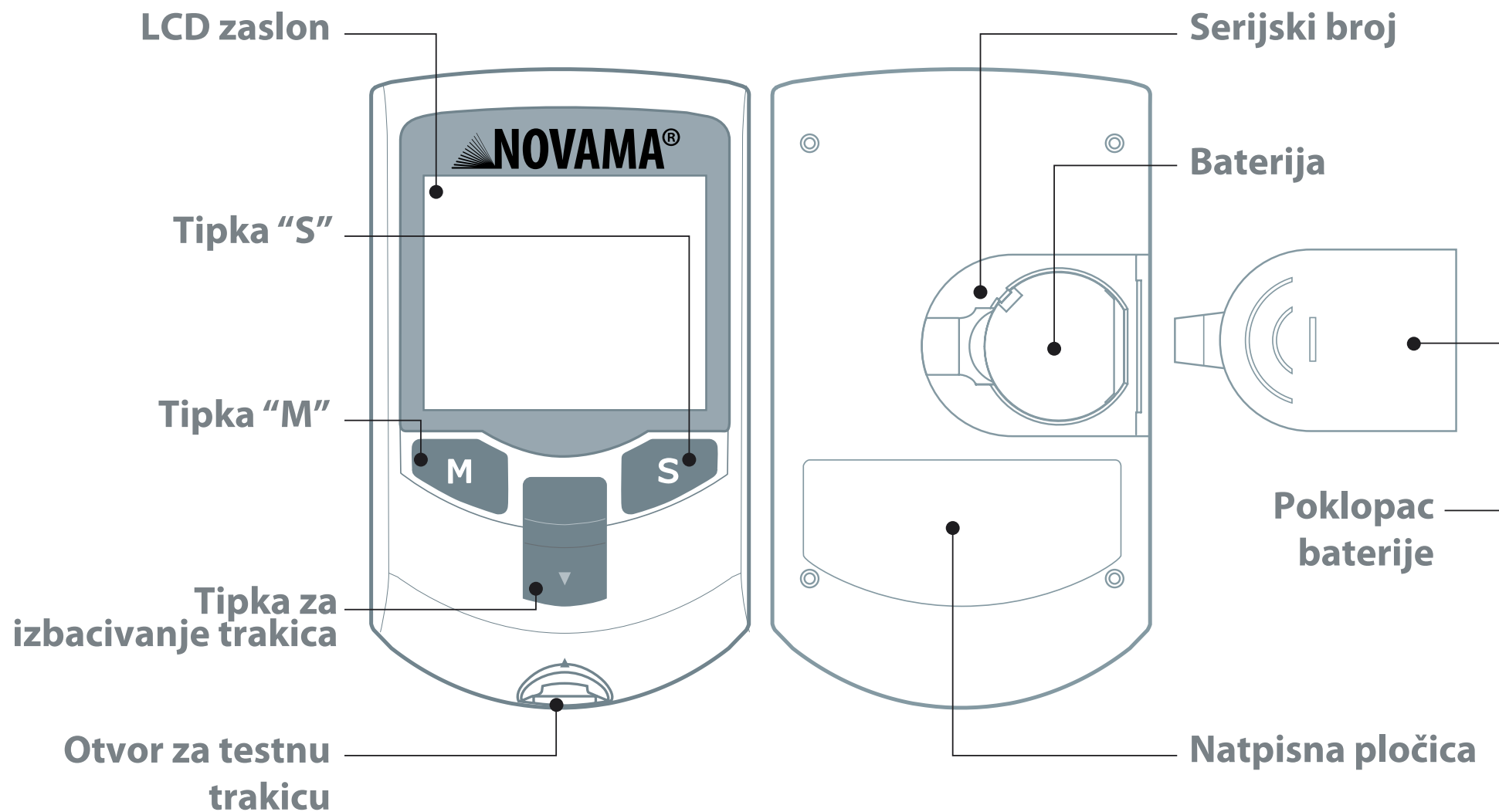

OPIS UREĐAJA**UREĐAJ**

OPIS SADRŽAJA ZASLONA

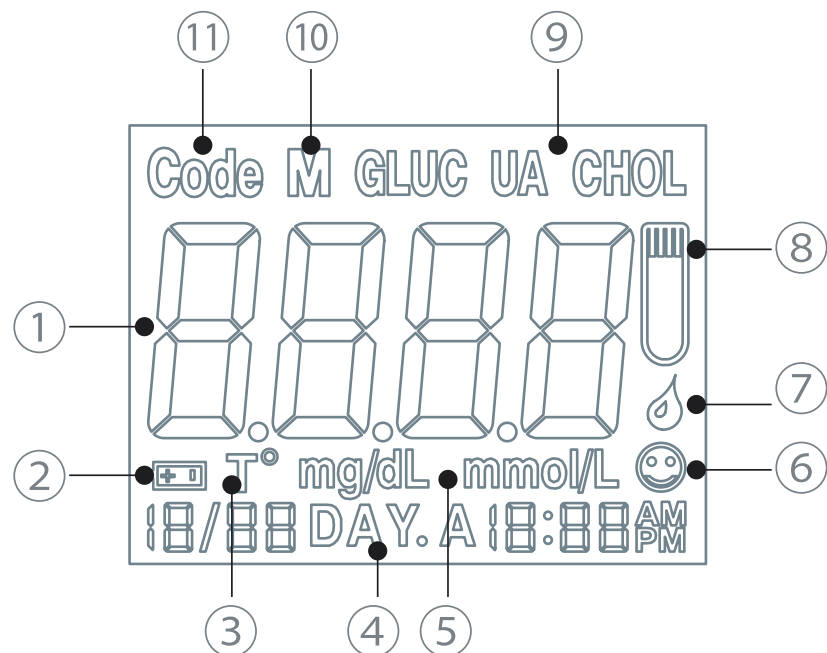

1. Rezultat
2. Upozorenje na nisku razinu baterije
3. Temperatura
4. Dnevni prosjek (GLU)
5. Jedinica
6. Provjera sustava
7. Ikona nanošenja krvi
8. Ikona umetanja trakice
9. Način mjerenja
10. Način memorije
11. Broj koda


ZVUČNI SIGNALI

- Uobičajeni signal: kratki „bip”.
- Upozoravajući signal: 3 kratka „bip-bip-bip”.
- Uključivanje/isključivanje: dugi „biiip”.


OPIS TESTNIH TRAKICA

GLU (GDH-FAD) - glukoza **CHOL - ukupni kolesterol** **UA - mokraćna kiselina**




UPOZORENJE: GLU trakice nemaju kodove.

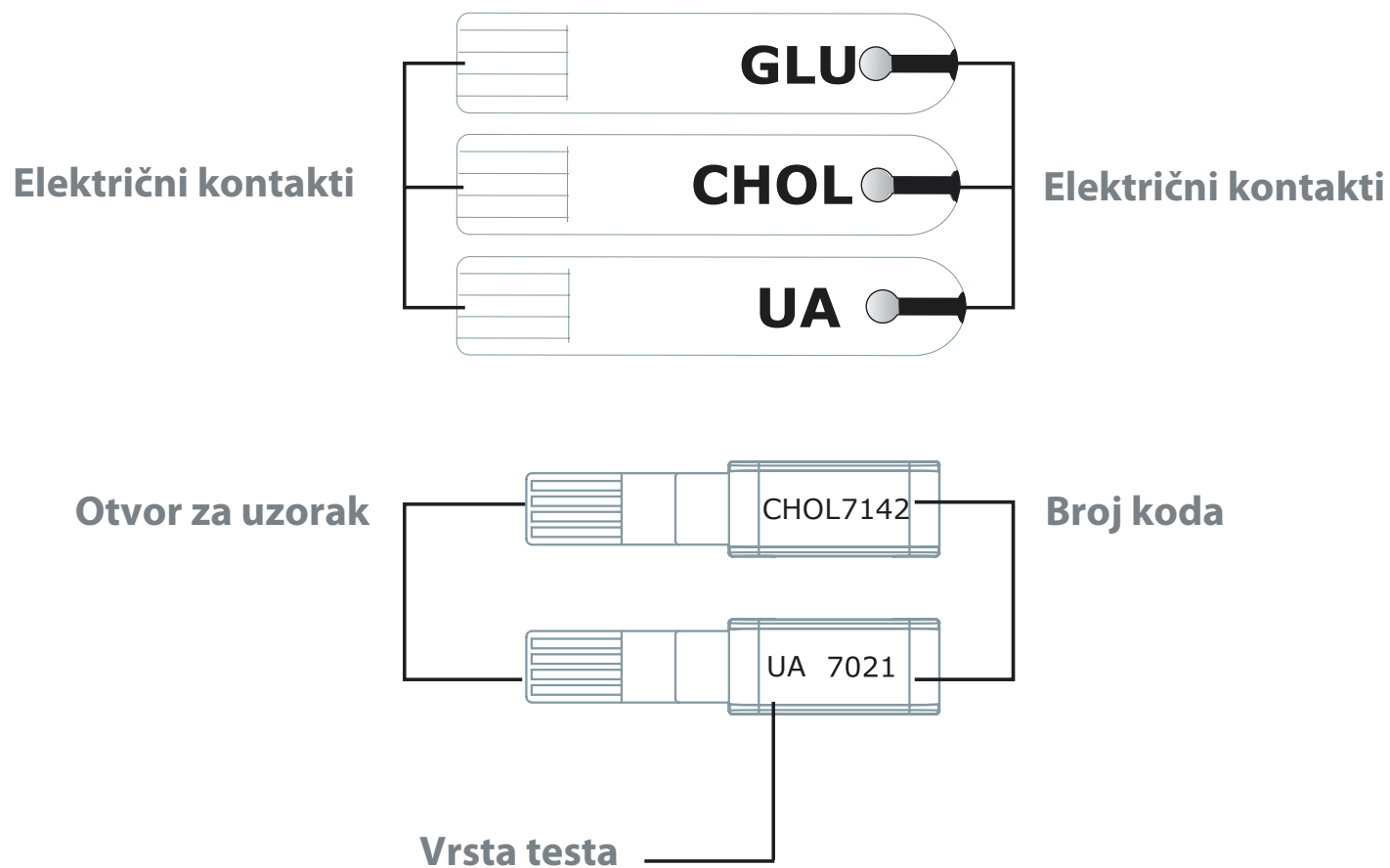

OPIS LANCETARA

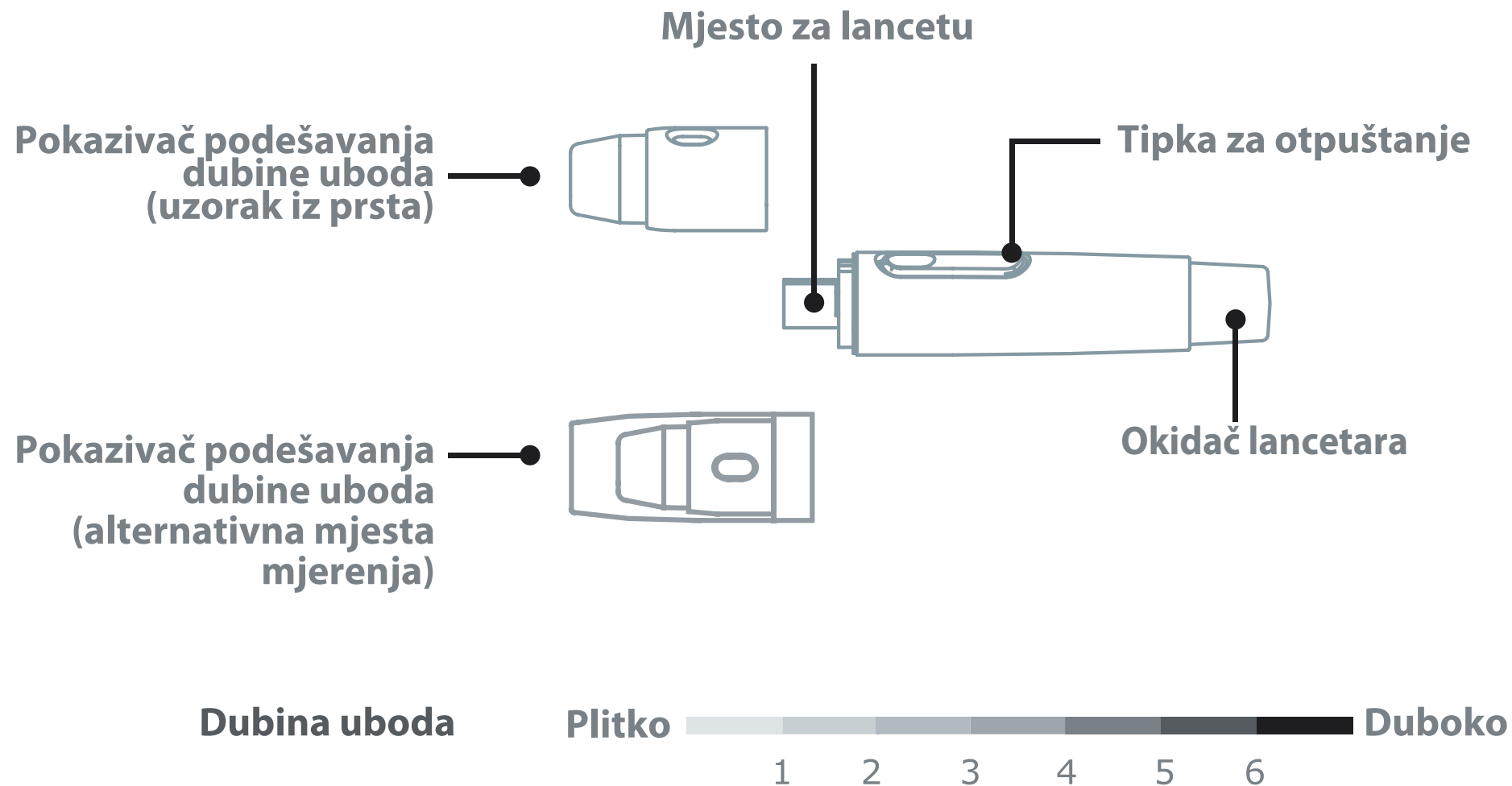

KORIŠTENI SIMBOLI I OZNAKE

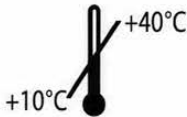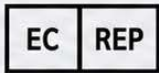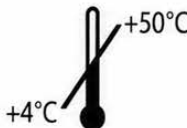	Rok valjanosti		In vitro dijagnostika		Broj serije
	Proizvođač		Datum proizvodnje		Serijski broj
	Samo za jednokratnu uporabu		Dopuštena radna temperatura		Pročitajte upute za uporabu
	Čuvati na suhom mjestu		Ovlašteni predstavnik u EU		CE certifikat
	Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti		Dopuštena temperatura skladištenja i transporta		Upozorenje – pročitajte priloženu dokumentaciju
	Pridržavajte se Direktive WEEE 2012/19/EU: Otpadnu opremu zbrinuti u skladu s važećim propisima.				Relativna vlažnost pri skladištenju i transportu

UVOD

Prije donošenja bilo kakve medicinski važne odluke pažljivo pročitajte upute za mjerni uređaj prije uporabe i posavjetujte se sa zdravstvenim stručnjakom. Za dodatnu pomoć u vezi s proizvodom obratite se lokalnoj službi za korisnike.

UOBIČAJENI UVJETI OKOLINE

Ovaj mjerni uređaj projektiran je za rad u sljedećim uvjetima:

- Uporaba u zatvorenim prostorima.
- Prenaponska kategorija II.
- Stupanj onečišćenja 2.

ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST

Ovaj mjerni uređaj ispunjava zahtjeve elektromagnetske kompatibilnosti, emisija i otpornosti te zahtjeve normi IEC 61326-2-6, ISO 18113-5 i IEC 61010-1.

NAMJENA

- Samo za in vitro dijagnostiku.
- Mjerenje koncentracije glukoze u kapilarnoj punoj krvi uzetoj iz prsta, dlana ili podlaktice.
- Mjerenje ukupnog kolesterola / mokraćne kiseline u kapilarnoj punoj krvi uzetoj iz prsta / venske krvi / arterijske krvi.

METODA MJERENJA

- Mjerni uređaj mogu koristiti pojedinačni korisnici ili zdravstveni djelatnici.
- Elektrokemijska biosenzorska tehnologija.

Mjerni uređaj kalibriran je prema plazmi pomoću referentnih instrumenata koji koriste sljedeće standardizirane materijale i metode:

TEST	STANDARD	METODA
Glukoza	NIST SRM 917	Glukoza dehidrogenaza
Kolesterol	NIST SRM 911	Abell-Kendall
Mokraćna kiselina	NIST SRM 913	Urikaza/UV

PRIPREMA UREĐAJA ZA RAD

UMETANJE I ZAMJENA BATERIJE


U uređaj je uključena litijaska baterija od 3 V (CR2032).

UPOZORENJE: Prije uporabe uređaja uklonite plastični umetak ispod baterije.


NAPOMENA: Baterije zbrinite u skladu s lokalnim propisima o zaštiti okoliša.

UMETANJE I ZAMJENA BATERIJE


Pomaknite poklopac baterije na stražnjoj strani uređaja.

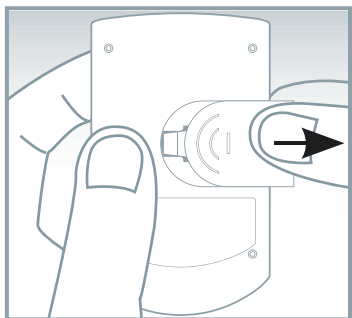

Izvadite staru bateriju i zamijenite je novom

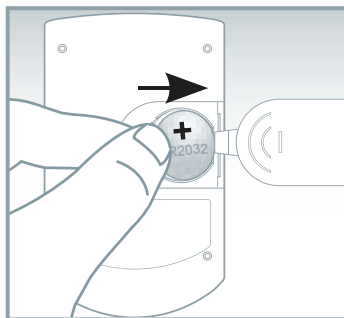


Ponovno zatvorite poklopac baterije.

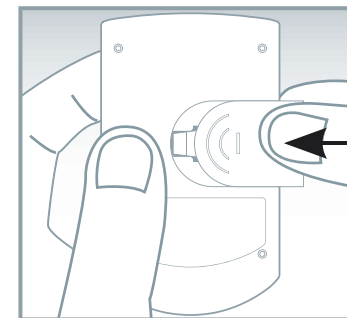

POSTAVLJANJE DATUMA I VREMENA


1. Za ulazak u način postavljanja pritisnite i držite tipku „S” dulje od tri sekunde. Začut ćete jedan „bip”. Redoslijed postavljanja je: godina, mjesec, dan, sat, minute.
2. Svakim pritiskom tipke „M” odabrana se vrijednost povećava za jednu jedinicu.
3. Kada postavite željenu vrijednost, pritisnite tipku „S” za potvrdu i prelazak na sljedeću postavku.
4. Uređaj će se automatski isključiti nakon postavljanja posljednjeg parametra.

UPOZORENJE: Ispravno postavljanje uređaja važno je za pravilno upravljanje podacima o vašem zdravlju.

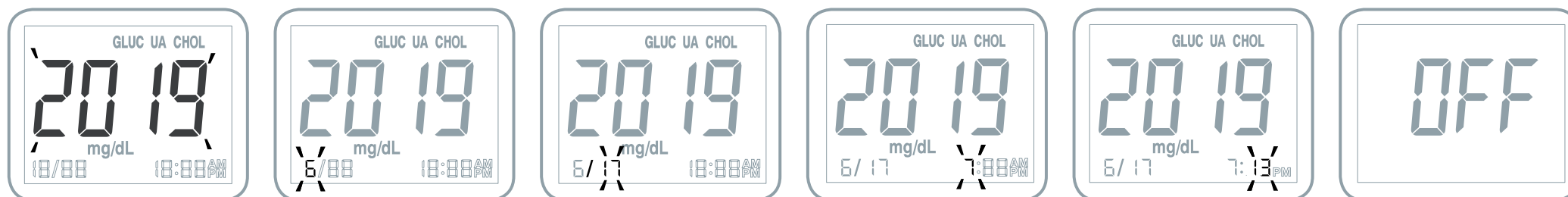


KODIRANJE UREĐAJA - MOKRAĆNA KISELINA / UKUPNI KOLESTEROL


UPOZORENJE: Sustav se mora kodirati prije prve uporabe te svaki put kada počnete koristiti novo pakiranje trakica.

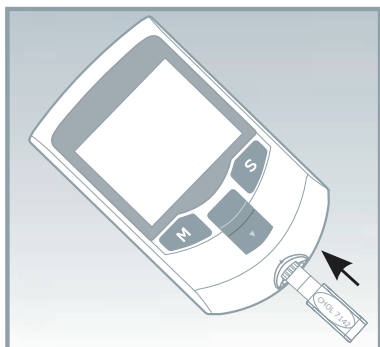

1. Provjerite je li uređaj uključen. Zatim umetnite kodnu trakicu u uređaj. Uređaj će se uključiti.

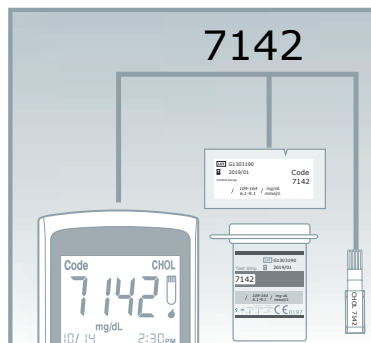

2. Provjerite jesu li kod na zaslonu, kodnoj trakici i pakiranju trakica jednaki.

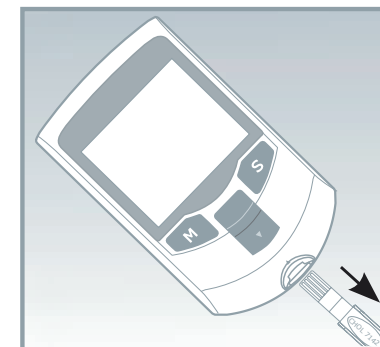


3. Izvadite kodnu trakicu iz uređaja. Uređaj će se automatski isključiti.

NAPOMENA: Zahvaljujući funkciji Auto Strip Recognition (automatsko prepoznavanje trakice), nakon kodiranja uređaj će se pri umetanju trakice automatski prebaciti u odgovarajući način mjerenja.


IZVOĐENJE MJERENJA

PRIJE POČETKA MJERENJA


- Potrebno je: uređaj NOVAMA MultiCheck Pro+, testne trakice, lancetar, lancete te maramica ili vata natopljena 75 %-tnim alkoholom za čišćenje mjesta uzimanja uzorka.
- Operite i dezinficirajte ruke te ih prije mjerenja dobro osušite.

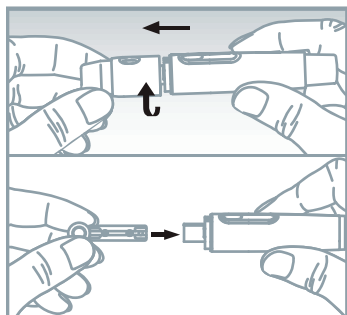


1. Umetnite lancetu i čvrsto je pritisnite.

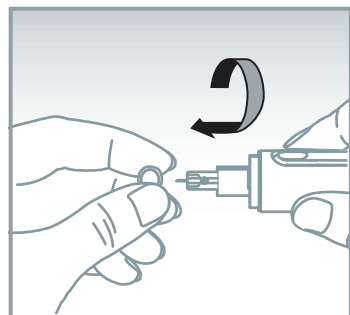


2. Odvrtite zaštitni vrh lancete.

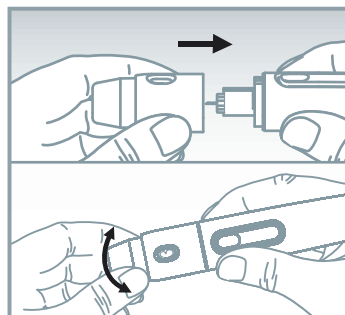

3. Navijte poklopac lancetara. Podesite dubinu uboda.

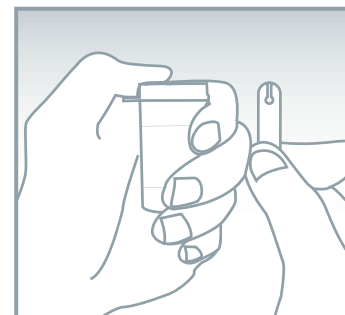


4. Kako biste spriječili vlaženje testnih trakica, odmah nakon vađenja trake zatvorite poklopac spremnika.

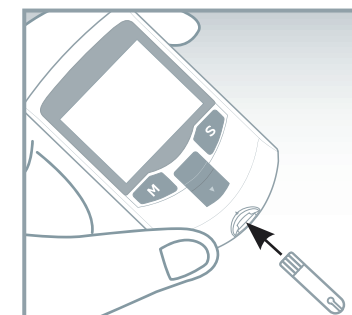


5. Umetnite trakicu u uređaj. Uređaj će se automatski uključiti.




6. Provjerite da se isti kod nalazi na pakiranju trakica i na zaslonu uređaja.

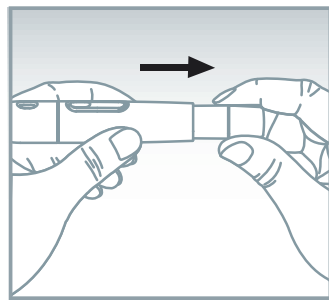


7. Povucite okidač lancetara kada ste spremni za mjerenje.

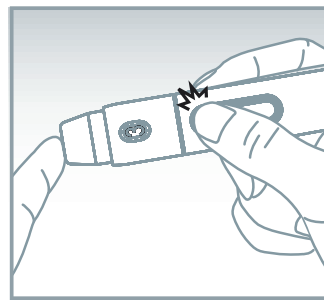

8. Prislonite lancetar na prst i pritisnite tipku za otpuštanje lancete.

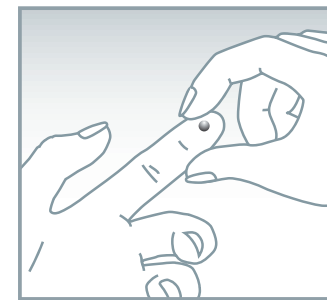


9. Obrišite prvu kap krvi i nježno pritisnite mjesto uboda.

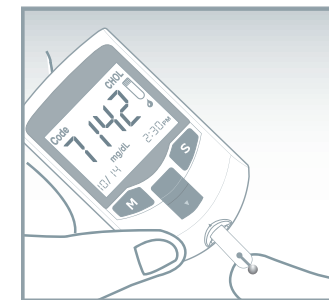

10. Prislonite mjesto uzimanja uzorka na otvor za uzorak na trakici. Uzorak krvi automatski će se uvući u trakicu.


UPOZORENJE: Nedovoljno punjenje testne trake krvlju može uzrokovati netočan rezultat mjerenja ili izostanak rezultata. Nemojte ponovno nanositi krv na istu testnu trakicu.

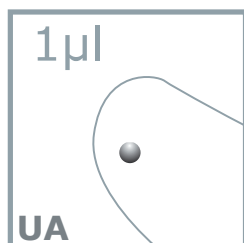

Glukoza / Mokraćna kiselina / Kolesterol




Ispravno

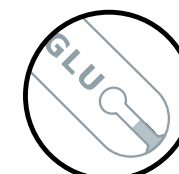


Pogrešno


IZVOĐENJE MJERENJA - ZAVRŠNI KORACI

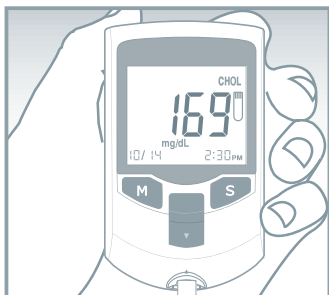


11. Na zaslonu će se pojaviti odbrojavanje, a zatim rezultat mjerenja. Izvadite trakicu i odložite je u spremnik za medicinski otpad.

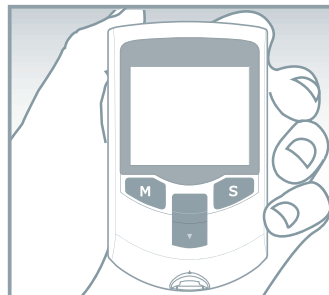


12. Mjerni uređaj automatski će se isključiti.

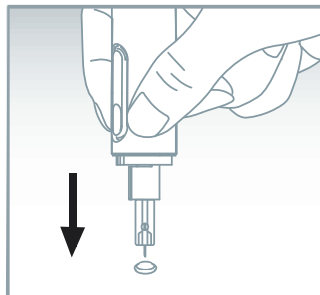

13. Ne dodirujući iglu, zaštitite je prethodno uklonjenim zaštitnim vrhom.

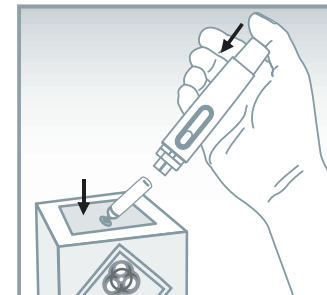

14. Lancetu odložite u spremnik za medicinski otpad u skladu s važećim propisima.

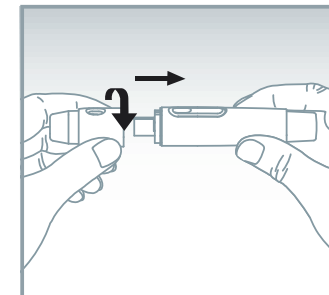

15. Osigurajte lancetar i spremite ga na sigurno mjesto.

ZAPAMTITE

- Mjerenje je potrebno provesti unutar 5 minuta; u protivnom će se uređaj automatski isključiti.
- Mjerni uređaj neće se uključiti ako umetnete pogrešan kraj ili pogrešnu stranu trakice.
- Na spremnik trakica zapišite datum otvaranja. Ne koristite trakice kojima je istekao rok valjanosti.
- Pad, udarac ili drugo oštećenje može uzrokovati neispravan rad uređaja.
- Ne koristite uređaj u blizini magnetskih ili elektromagnetskih polja niti izvora radiofrekvencijskih smetnji.
- Ne stavljajte trakice u usta ili nos i nemojte ih gutati.
- Uređaj ne bi smjele koristiti osobe mlađe od 15 godina koje ne mogu samostalno i pravilno čitati upute.

UPOZORENJA

- Pri zbrinjavanju testnih trakica i lanceta pridržavajte se lokalnih propisa.
- Rabljene testne trakice, lancete i svi drugi materijali koji su bili u kontaktu s uzorkom krvi moraju se smatrati potencijalno biološki opasnim.
- Ako korisnik boluje od zarazne bolesti, testne trakice i drugi materijali mogu biti izvor infekcije.
- Lanceta i testna trakica ne smiju se ponovno koristiti.
- Uvijek koristite certificiranu lancetu radi sigurnosti.
- Cijeli mjerni komplet čuvajte izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca.

ALTERNATIVNA MJESTA MJERENJA (AST)

Razinu glukoze moguće je mjeriti iz krvi uzete iz prsta, dlana ili podlaktice. Uzimanje krvi iz dlana ili podlaktice može smanjiti bol pri mjerenju, ali se razina glukoze u tim mjestima može mijenjati drukčijom brzinom. Te razlike mogu dovesti do medicinski pogrešne odluke.

UPOZORENJE: Prije uzimanja uzorka krvi s alternativnih mjesta posavjetujte se sa zdravstvenim djelatnikom.

Odgovarajuće vrijeme za uzimanje uzorka krvi s alternativnih mjesta:


- Uobičajeno prije obroka.
- 2 sata prije ili poslije obroka (kratkodjelujući analozi inzulina ili fizička aktivnost).

ALTERNATIVNA MJESTA MJERENJA (AST) - NASTAVAK

NEMOJTE UZIMATI KRV S ALTERNATIVNIH MJESTA U SLJEDEĆIM SITUACIJAMA:

- Tijekom obroka (kratkodjelujući analozi inzulina ili fizička aktivnost).
- Kada mislite da vam je razina glukoze u krvi niska ili niste svjesni niske vrijednosti.
- Ako vam je dijagnosticirana hipoglikemija ili hiperglikemija.
- Kada rezultat mjerenja s alternativnog mjesta nije u skladu s vašim zdravstvenim stanjem.
- Kada ste bolesni, upravljate strojem ili vozite automobil.

UZIMANJE UZORKA S DLANA

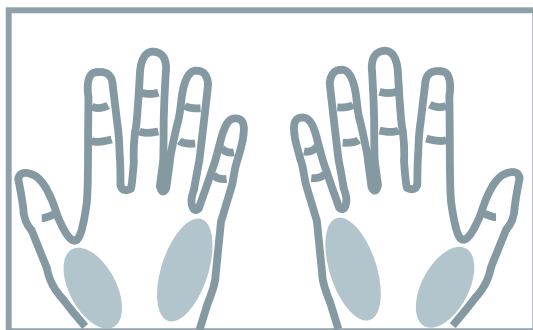

- Odaberite mjesto bez vidljivih vena.
- Izbjegavajte duboke brazde i linije na dlanu.

UZIMANJE UZORKA S PODLAKTICE



- Odaberite mjesto udaljeno od kosti.
- Izbjegavajte vidljive vene i dlake.

UZIMANJE UZORKA S ALTERNATIVNOG MJESTA

1. Ponovite korake 1-7 iz poglavlja IZVOĐENJE MJERENJA (zamijenite standardni vrh lancetara podesivim AST vrhom za alternativno mjesto).
2. Prilignite lancetar na mjesto uzimanja uzorka i pritisnite tipku za otpuštanje.
3. Držite lancetar pritisnutim uz mjesto uzimanja uzorka dok ne dobijete odgovarajuću količinu krvi.
4. Zatim ponovite korake 10-15 iz poglavlja IZVOĐENJE MJERENJA.

ALTERNATIVNA MJESTA MJERENJA / FUNKCIJE MEMORIJE

NAPOMENA

- Ako rezultat mjerenja s alternativnog mjesta nije u skladu s vašim zdravstvenim stanjem, uzmite uzorak iz prsta.
- Ponavljano ubadanje istog mjesta može uzrokovati bol i upalu.
- Ne pritiskujte mjesto uzimanja uzorka prejako. Dobivanje dovoljne količine krvi može potrajati dulje.
- Ne koristite razmazanu krv; uzmite novi uzorak.
- Ako i dalje ne možete dobiti dovoljan uzorak krvi, pokušajte upotrijebiti iglu većeg promjera ili uzmite krv iz prsta.

FUNKCIJE MEMORIJE UREĐAJA

- Glukoza - 360 rezultata, uz izračun prosjeka za 7, 14, 21 i 28 dana.
- Ukupni kolesterol - 50 rezultata.
- Mokraćna kiselina - 50 rezultata.


Memorija pohranjuje rezultate mjerenja glukoze u krvi od M01 do M360, a za mokraćnu kiselinu i ukupni kolesterol od M01 do M50. Slijedite ove upute za pregled pohranjenih rezultata.

UPUTE ZA PREGLED MEMORIJE

1. Uzmite uređaj u ruku. Nemojte umetati testnu trakicu.
2. Pritisnite tipku „M” na 3 sekunde - začut ćete kratak zvučni signal.
3. Uređaj će nakratko prikazati sve elemente zaslona.
4. Pritisnite tipku „M” za odabir odgovarajućeg načina memorije (GLUC / CHOL / UA).
5. Pritisnite tipku „S” za potvrdu načina memorije.
6. Pritiskujte tipku „S” za prikaz sljedećih pohranjenih rezultata.
7. Pritiskujte tipku „M” za povratak na prethodne rezultate.
8. Pritisnite i držite tipku „M” 3 sekunde za uključivanje uređaja.

- U načinu memorije GLU najprije se prikazuju prosječne vrijednosti za 7, 14, 21 i 28 dana.
- Nakon ulaska u jedan način memorije nije moguće izravno prijeći u drugi. Za promjenu načina najprije isključite mjerni uređaj (pritisnite i držite tipku „M” 3 sekunde), a zatim ponovno uđite u način memorije.


Rezultati iz memorije prikazuju se na sljedeći način:

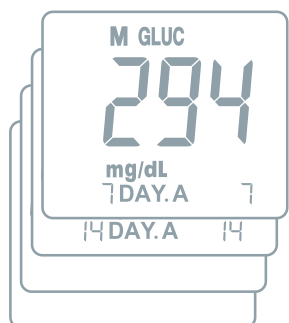

7-, 14-, 21-,
28-dnevni prosjek



◀Treptanje▶

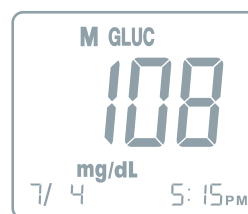

Rezultat mjerenja



◀Treptanje▶




Rezultat kontrolnog testa

KONTROLNI TEST

Za provjeru ispravnosti kompleta koristi se kontrolna otopina. Kontrolni test treba provesti:

- Kada uređaj ne radi pravilno.
- Kada je rezultat mjerenja neuobičajen ili nedosljedan.

Raspon kontrolnih otopina naveden je na pakiranju testnih trakica. Provjerite naljepnicu na pakiranju trakica kako biste utvrdili točan raspon.

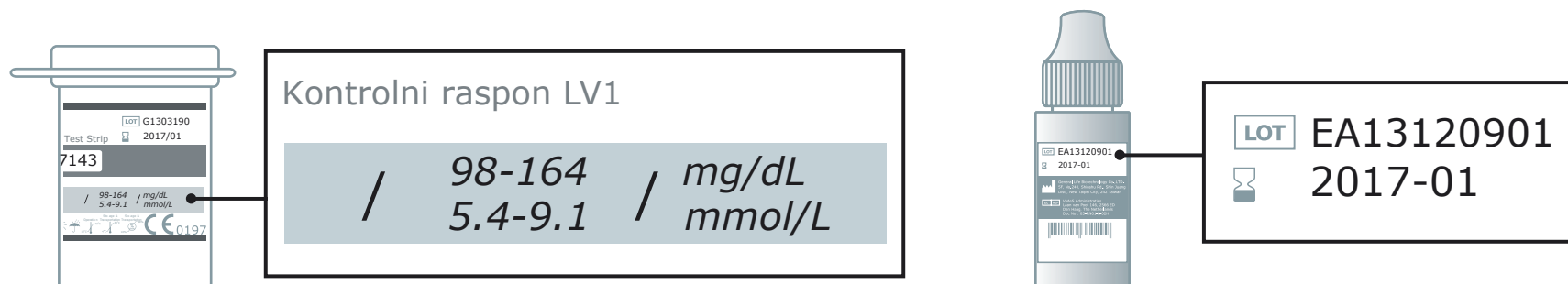

PROVOĐENJE KONTROLNOG MJERENJA

1. Uzmite uređaj u ruku. Umetnite nekorištenu testnu trakicu. Uređaj će se uključiti.
2. Provjerite je li kod na zaslonu jednak kodu na pakiranju trakica.
3. Pritisnite i držite tipku „M” 3 sekunde kako biste aktivirali način kontrolnog testa. Na zaslonu će se pojaviti simbol „CL”.
4. Dobro protresite kontrolnu otopinu.
5. Ispustite prve tri kapi.

KONTROLNI TEST - NASTAVAK / ODRŽAVANJE I NJEGA

6. Stavite jednu kap na čistu površinu.
7. Dodirnite kontrolnu otopinu ulaznim dijelom trakice umetnute u uređaj.
8. Pričekajte rezultat mjerenja.
9. Usporedite rezultat s rasponom navedenim na pakiranju trakica.

NAPOMENA

- Ne koristite istu testnu trakicu ponovno.
- Nakon otvaranja spremnika trakica i kontrolne otopine zapišite datum otvaranja.
- Ne koristite uređaj ako rezultat kontrolnog mjerenja nije unutar raspona navedenog na pakiranju trakica.
- Ako se pogrešni rezultati kontrolnog mjerenja ponavljaju, obratite se prodavatelju radi pomoći.
- Kontrolne otopine nisu uključene u komplet. Za kupnju ili provjeru uređaja u servisu obratite se ovlaštenom distributeru.

ODRŽAVANJE I NJEGA

ČUVANJE MJERNOG UREĐAJA I TRAKICA

Mjerni uređaj:

- Izbjegavajte udarce i nagle pokrete uređaja.
- Ne koristite uređaj u vrlo suhom okruženju jer može doći do elektrostatičkog pražnjenja.
- Ne koristite uređaj u području elektromagnetskog zračenja, primjerice u blizini električnih uređaja.
- Ne rastavljajte mjerni uređaj i iz kojeg razloga.
- Održavajte uređaj čistim tako a ga izvana brišete higijenskim maramicama ili mekom krpom koja ne ostavlja vlakna.
- Nisu dopuštene ikakve preinake ovog uređaja.
- Ne izlažite mjerač sunčevoj svjetlosti, toplini ni vlažnom okruženju. Ne dopustite ulazak vlakana ili prašine u uređaj.

Testne trakice:

- Ne čuvajte testne trakice a mjestima s visokom vlagom i ne izlažite ih izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Ne zamrzavajte niti hladne testne trakice.
- Tijekom rukovanja trakicama i mjerenja ruke moraju biti suhe i čiste.
- Nemojte savijati, rezati ili presavijati trakice.

ODRŽAVANJE / KODOVI POGREŠAKA I RJEŠAVANJE PROBLEMA

- Otopina od 10 % kućnog izbjeljivača i 90 % vode.

NAPOMENA

- Ne koristite druge vrste vlažnih maramica niti tekućina.
- Ne dopustite da bilo kakva tekućina dospije u područje otvora za testnu trakicu ili poklopca baterije.
- Prije uporabe provjerite je li mjerni uređaj potpuno suh.
- Jamstvo i zaštita ne vrijede ako se uređaj koristi na način koji proizvođač nije predvidio.

KODOVI POGREŠAKA I RJEŠAVANJE PROBLEMA

KOD	OPIS PROBLEMA	RJEŠENJE
	Problem s kodnom trakicom. Problem s testnom trakicom. Testna trakica nije pravilno umetnuta.	Ponovite postupak kodiranja. Ako se problem nastavi, ponovno umetnite testnu trakicu. Ako se problem ne otkloni, obratite se lokalnom distributeru ili servisu.
	Slaba baterija.	Odmah zamijenite bateriju.

KODOVI POGREŠAKA I RJEŠAVANJE PROBLEMA

GREŠKA	UZROK	RJEŠENJE
	• Problem s kodnom trakicom. • Uređaj je nepravilno kodiran.	Ponovite postupak kodiranja. Ako se problem ponovi, obratite se prodavatelju ili servisu.
	• Temperatura je viša ili niža od dopuštenog radnog raspona uređaja.	Ponovite test nakon što trakice i uređaj dosegnu odgovarajuću temperaturu.
	• Korištena testna trakica. • Testna trakica je navlažena.	Ponovite mjerenje s novom trakicom. Ako se problem ponavlja, obratite se prodavatelju ili servisu.
	• Mjerenje nije završeno; trakica je izvučena tijekom mjerenja.	Pročitajte upute i ponovno provedite mjerenje. Ne vadite trakicu prije završetka testa.
	• Problem s trakicom.	Provedite mjerenje s novom trakicom. Ako se problem ponavlja, obratite se prodavatelju ili servisu.

KODOVI POGREŠAKA I RJEŠAVANJE PROBLEMA

GREŠKA	UZROK	RJEŠENJE
	Pogrešna kodna trakica.	Ponovite postupak kodiranja. Ako se problem ponovi, obratite se prodavatelju ili servisu.
	Nedovoljna količina uzorka krvi.	Ponovite mjerenje i nanosite dovoljnu količinu krvi na trakicu. Ako se problem ponovi, obratite se prodavatelju ili servisu.
	Rezultat mjerenja viši je od raspona navedenog u odjeljku „Mjerni raspon“.	Pročitajte upute za uporabu i ponovite mjerenje. Ako se problem ponavlja, obratite se prodavatelju ili servisu.
	Rezultat mjerenja niži je od raspona navedenog u odjeljku „Mjerni raspon“.	Pročitajte upute za uporabu i ponovite mjerenje. Ako se problem ponavlja, obratite se prodavatelju ili servisu.

SPECIFIKACIJE

PARAMETAR	VRIJEDNOST
Uzorak za test	Svježa kapilarna krv
Vrijeme mjerenja	GLU: 5 s; CHOL: 26 s; UA: 15 s

SPECIFIKACIJE

PARAMETAR	VRIJEDNOST
Mjerni raspon	GLU: 20-600 mg/dL (1,1-33,3 mmol/L) CHOL: 100-400 mg/dL (2,59-10,35 mmol/L) UA: 3-20 mg/dL (0,18-1,19 mmol/L)
Volumen uzorka	GLU: 0,7 µL; CHOL: 0,8 µL; UA: 1 µL
Skladištenje trakica	4-30 °C (39-86 °F)
Radna temperatura	10-40 °C (50-104 °F)
Relativna vlažnost	10-90 %
Memorija	460 rezultata (GLU: 360; CHOL: 50; UA: 50)
Vrsta baterije	Jedna litijska baterija 3 V (CR2032)
Trajanje baterije	Oko 1000 mjerenja
Dimenzije	88 × 52 × 16 mm (duljina × širina × visina)
Masa	Oko 50 g (s baterijom)
Maksimalna nadmorska visina	3.048 m (10.000 stopa)
Očekivani uporabni vijek	5 godina

NAPOMENA: Informacije o točnosti, preciznosti, ograničenjima i drugim važnim podacima nalaze se u uputama priloženima uz testne trakice.

SADRŽAJ PAKIRANJA

Prije prve uporabe kompleta provjerite sadržaj pakiranja.

Paket sadrži:

- NOVAMA MultiCheck Pro+ mjerač (BK1-10M) s baterijom CR2032 3 V.
- Upute za uporabu.
- Zaštitnu torbicu.
- Lancetar.

Opcionalno (nije uključeno u standardni komplet; obratite se lokalnom distributeru):

- NOVAMA MultiCheck Pro+ trakice za mjerenje glukoze (BK1-G).
- NOVAMA MultiCheck Pro+ trakice za mjerenje kolesterola (BK-C2).
- NOVAMA MultiCheck Pro+ trakice za mjerenje mokraćne kiseline (BK-U1).
- NOVAMA MultiCheck Pro+ III - kontrolna otopina za testiranje glukoze.
- NOVAMA MultiCheck Pro+ II - kontrolna otopina za testiranje kolesterola.
- NOVAMA MultiCheck Pro+ - kontrolna otopina za testiranje mokraćne kiseline.
- Lancete (proizvođač: pogledajte naljepnicu na pakiranju).

UPOZORENJE: Ako je nakon kupnje bilo koji dio sadržaja oštećen, odmah se obratite ovlaštenom distributeru.

JAMSTVENI LIST

STAVKA	PODATAK
Naziv i model uređaja	NOVAMA MULTICHECK PRO+ BK1-10M
Distributer za Hrvatsku	KVANTUM-TIM d.o.o., Voćarska 6a, 10437 Rakitje
Kontakt distributera	TEL: 01 3637453 E-mail: kvantum-tim@kvantum-tim.hr WEB: www.kvantum-tim.hr
Servis za Hrvatsku	KVANTUM-TIM d.o.o., Voćarska 6a, 10437 Rakitje TEL: 01 3637453 E-mail: servis@kvantum-tim.hr
Razdoblje jamstva	36 mjeseci (3 godine) od dana kupnje.
Početak jamstvenog roka	Jamstvo vrijedi od datuma kupnje potvrđenog dokazom o kupnji.
Područje važenja jamstva	Republika Hrvatska.

Jamstvo za ovaj proizvod vrijedi tri (3) godine od dana kupnje.

Distributer se obvezuje da će tijekom ovog razdoblja uređaj biti besplatno popravljen, odnosno zamijenjen ako kvar nije moguće otkloniti.

Jamstvo ne pokriva kvarove uzrokovane nepravilnim korištenjem ili neovlaštenim pokušajem popravka uređaja u jamstvenom roku. Jamstvo ne pokriva potrošne dijelove priložene uz uređaj.

UVJETI JAMSTVA

PRAVA KUPCA

Jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama.

POSTUPAK U SLUČAJU REKLAMACIJE

U slučaju reklamacije obratite se servisu za Hrvatsku: KVANTUM-TIM d.o.o., Voćarska 6a, 10437 Rakitje, tel. 01 3637453, e-mail: servis@kvantum-tim.hr.

PODRUČJE VAŽENJA JAMSTVA

Jamstvo vrijedi na teritoriju Republike Hrvatske.

OGRANIČENJA JAMSTVA

Jamstvo ne pokriva kvarove i oštećenja nastala nepravilnom uporabom, uporabom suprotnom uputama, neodgovarajućim održavanjem ili čišćenjem, neovlaštenim popravcima ili preinakama te vanjskim uzrocima. Jamstvo ne pokriva potrošne dijelove koji se prirodno troše tijekom uporabe.

PODACI O KUPNJI

DATUM KUPOVINE: _____

PEČAT PRODAVATELJA I POTPIS PRODAVATELJA: _____

KONTAKTNI PODACI

PROIZVOĐAČ



General Life Biotechnology Co., LTD.
5F., No. 240, Shinshu Rd., Shin Juang Dist., New Taipei City 242, Taiwan

OVLAŠTENI PREDSTAVNIK U EUROPSKOJ UNIJI



MDSS GmbH
Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany

Proizvedeno u Tajvanu / Made in Taiwan.

DISTRIBUTER ZA HRVATSKU

KVANTUM-TIM d.o.o.
Voćarska 6a
10437 Rakitje
TEL: 01 3637453
E-mail: kvantum-tim@kvantum-tim.hr
WEB: www.kvantum-tim.hr

SERVIS ZA HRVATSKU

KVANTUM-TIM d.o.o.
Voćarska 6a
10437 Rakitje
TEL: 01 3637453
E-mail: servis@kvantum-tim.hr
WEB: www.kvantum-tim.hr

