


FLAEM[®] Puppy

KORISNIČKI PRIRUČNIK

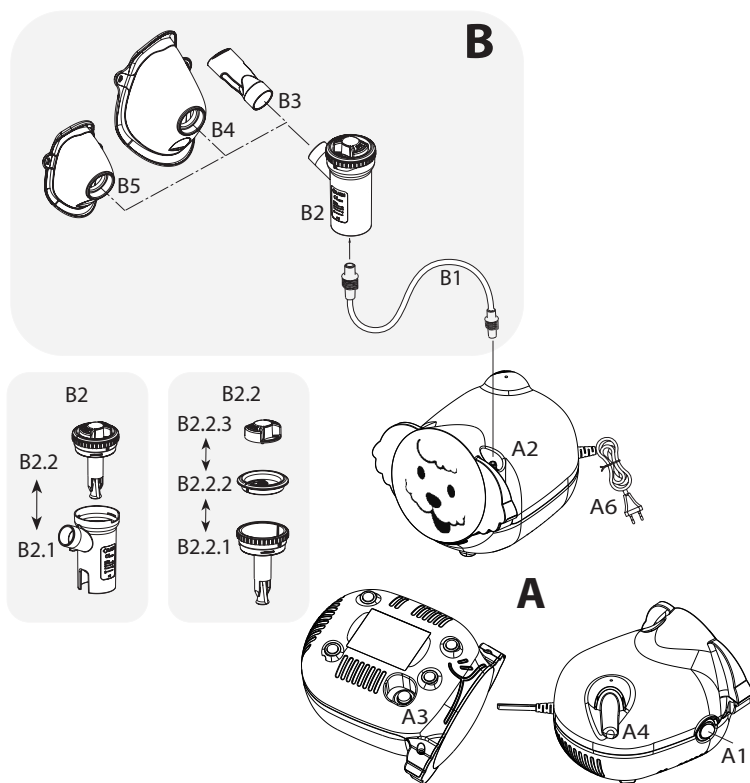

A = # P0513EM F400

B = # RF8-3

DIAGRAM SASTAVLJANJA

Flaem Nuova S.p.A. nudi široku paletu tuševa za nos za liječenje gornjih dišnih puteva, kako samostalnih tako i onih koji se koriste u kombinaciji s inhalatorima. Ovaj medicinski uređaj može se koristiti u kombinaciji sa svim dodatnim tuševima za nos koje možete pronaći na web stranici (www.flaem.it).



Aerosolni terapijski uređaj

Aerosolni terapijski uređaj za inhalaciju

terapijski uređaj FLAEM sastoji se od kompresorske jedinice (A), raspršivača i nekoliko dodataka (B).

PREDVIĐENA UPORABA

Uređaj za primjenu lijekova putem inhalacije, pomoću inhalacijske terapije i lijekova koje je prepisao liječnik.

INDIKACIJE ZA UPORABU

Liječenje respiratornih bolesti. Lijekove mora propisati liječnik koji je procijenio opće stanje pacijenta.



KONTRAINDIKACIJE

- Medicinski uređaj se NE SMIJE koristiti kod pacijenata koji ne mogu samostalno disati ili nisu pri svijesti.
- Ne koristite uređaj u anesteziološkim ili ventilacijskim krugovima za pomoć pri disanju.

NAMJENJENI KORISNICI

Uređaj mogu koristiti ovlašteno medicinsko osoblje/zdravstveni radnici (liječnici, medicinske sestre, terapeuti, itd.). Uređaj je namijenjen i za kućnu upotrebu.

CILJNA SKUPINA PACIJENATA

Odrasli, djeca svih dobnih skupina, dojenčad. Prije korištenja uređaja, morate pažljivo pročitati korisnički priručnik, a odgovorna odrasla osoba mora biti prisutna tijekom uporabe kod dojenčadi, djece bilo koje dobi ili osoba s ograničenim sposobnostima (npr. fizičkim, mentalnim ili osjetilnim). Medicinsko osoblje mora procijeniti pacijentovo stanje i sposobnosti, kako bi prilikom propisivanja terapije odredili je li pacijent sposoban samostalno i sigurno koristiti inhalator ili ako je potrebna odgovorna osoba za provođenje terapije. Za procjenu uporabe uređaja kod određene vrste pacijenata, poput trudnica, dojilja, dojenčadi, hendikepiranih osoba ili osoba s ograničenim tjelesnim sposobnostima, konzultirajte se s liječnikom.

OKOLINA RADA

Ovaj uređaj namijenjen je korištenju: zdravstvenim ustanovama, poput bolnica, ambulantnih klinika, itd. ili kod kuće.

• UPOZORENJA

- Koristite uređaj samo kao terapijski inhalator. Ovaj medicinski uređaj nije namijenjen za spašavanje života. Bilo koja druga upotreba smatra se neispravnom i može biti opasna. Proizvođač nije odgovoran za neispravnu upotrebu.
- Uvijek se posavjetujte sa svojim obiteljskim liječnikom za određivanje terapije.
- Pratite upute svog liječnika ili terapeuta o vrsti lijeka, doziranju i uputama za liječenje.
- Ako dobijete alergijsku reakciju ili druge probleme tijekom korištenja uređaja, odmah prestanite s upotrebom i konzultirajte svog liječnika.
- Spremite ovaj priručnik za daljnju upotrebu.
- Ako je ambalaža oštećena ili otvorena, kontaktirajte distributera ili servisni centar.
- Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.
- Nemojte držati uređaj blizu izvora topline, na suncu ili u izrazito vrućem okruženju.
- Potrebno vrijeme za prijelaz iz uvjeta skladištenja u radni način iznosi otprilike 2 sata.
- Zabranjeno je otvarati kompresorsku jedinicu na bilo koji način. Popravke smiju izvoditi samo ovlašteni stručnjaci. Neovlašteni popravci poništavaju jamstvo i mogu biti opasni po korisnika.

- **Opasnost od gušenja:**

Neki dijelovi uređaja dovoljno su mali da ih djeca mogu progutati, stoga držite uređaj izvan dohvata djece.

- **Opasnost od gušenja:**

Ne koristite priloženu spojnu cijev i kabele van njihove namijenjene upotrebe, jer postoji opasnost od gušenja. Posebno pripazite djecu i osobe s posebnim potrebama jer ove osobe ne mogu pravilno procijeniti opasnost.

- **Opasnost od požara:**

Ovaj uređaj nije prikladan za uporabu u prisutnosti anestetičke mješavine zapaljive sa zrakom, kisikom ili dušičnim oksidom.

- **Opasnost od strujnog udara:**

- Prije prvog korištenja te periodično tijekom radnog vijeka proizvoda, provjerite cjelovitost strukture uređaja i strujnog kabela kako biste provjerili moguća oštećenja; ako je uređaj oštećen, nemojte ga uključivati nego ga odmah odnesite u ovlaštenu servisnu centar ili prodavaču.
- Držite kabel dalje od životinja (npr. glodavaca) jer takve životinje mogu oštetiti njegovu izolaciju.
- Uvijek držite strujni kabel dalje od vrućih površina.
- Nemojte blokirati otvore za ventilaciju smještene s obje strane kompresorske jedinice.
- Nemojte dirati kompresorsku jedinicu mokrim rukama. Nemojte koristiti kompresorsku jedinicu u vlažnom okruženju (npr. tijekom kupanja ili tuširanja). Ne uranjajte kompresorsku jedinicu u vodu; ako se to dogodi, odmah izvadite utikač iz struje. Ne povlačite niti dirajte kompresorsku jedinicu dok je uronjena u vodu, prvo je isključite. Odmah je odnesite ovlaštenom FLAEM servisnom centru ili prodavaču.

- **Opasnost od neefikasnosti terapije:**

- Učinkovitost može varirati s određenim vrstama lijekova (npr. onima visoke viskoznosti ili u suspenziji). Za dodatne informacije, pročitajte upute na pakiranju lijeka.
- Koristite raspršivač u ispravnom položaju, što je ispravnije moguće; ne naginjite raspršivač pod kutem više od 30 stupnjeva, ni u kojem smjeru, kako biste spriječili curenje lijeka u usta ili prekomjerno raspršivanje, čime se smanjuje učinkovitost tretmana.
- Pazite na upute na lijeku i izbjegavajte uporabu uređaja s nepreporučenim tvarima i otopinama.
- Koristite uređaj samo u okolini bez prašine, inače možete kompromitirati terapiju.
- Ne blokirajte i ne umećite predmete u filter i njegovo kućište.
- Kod pregustih tvari može biti potrebno razrjeđivanje odgovarajućom fiziološkom otopinom, prema liječničkom receptu.
- Koristite samo originalni Flaem pribor ili rezervne dijelove, ograđujemo se od odgovornost u slučaju korištenja neoriginalnih dijelova ili pribora.

- **Opasnost od infekcije:**

- Preporučujemo osobnu uporabu pribora kako biste izbjegli rizik od infekcije.
- Slijedite upute za higijensku pripremu prije svake uporabe. Pazite da se cijevi i pribor ne čuvaju u blizini drugog pribora ili uređaja za različitu terapiju (npr. infuziju).
- Na kraju terapije, ne ostavljajte lijek unutar raspršivača i provedite čišćenje.
- Ako se raspršivač koristi za više vrsta lijekova, ostaci se moraju potpuno ukloniti. Stoga provedite čišćenje nakon svake inhalacije, kako biste održali visok stupanj higijene i optimizirali trajanje i rad uređaja.

- **Opasnost od ozljeda:**

- Ne stavljajte uređaj na mekanu površinu poput kauča, kreveta ili stolnjaka.
- Uvijek ga koristite na tvrdj površini bez ikakvih predmeta.

UPOZORENJA O RIZICIMA INTERFERENCIJE TIJEKOM UPORABE U DIJAGNOSTIČKIM ISPITIVANJIMA

Ovaj uređaj dizajniran je kako bi zadovoljio trenutne zahtjeve elektromagnetske kompatibilnosti. Što se tiče zahtjeva za elektromagnetsku kompatibilnost, elektronički medicinski uređaji zahtijevaju posebnu pažnju tijekom instalacije i uporabe, te ih je stoga potrebno instalirati i/ili koristiti u skladu s uputama proizvođača. Postoji rizik od potencijalne elektromagnetske interferencije s drugim uređajima. Prijenosni ili prijenosni RF radio i telekomunikacijski uređaji (mobilni telefoni ili bežične veze) mogu ometati rad elektroničkih medicinskih uređaja. Uređaj može biti osjetljiv na elektromagnetske interferencije u prisutnosti drugih uređaja koji se koriste za određenu dijagnozu ili liječenje.

POVIJEST KVAROVA I NJIHOVA RJEŠENJA

Prije bilo kakve radnje, isključite uređaj i isključite ga iz struje.

Problem	Uzrok	Rješenje
Uređaj ne radi	Kabel nije ispravno spojen u priključak uređaja ili električnu utičnicu.	Ispravno priključite kabel u utičnicu.
Uređaj ne raspršuje ili slabo raspršuje	Nije stavljen lijev u raspršivač	Stavite pravilnu količinu lijeka u raspršivač.
	Raspršivač nije ispravno sastavljen	Razmontirajte i ponovno sastavite inhalator prema dijagramu sastavljanja na naslovnici.
	Raspršivač je začepljen	Očistite raspršivač. Naslage lijeka su zbog nedostatka čišćenja narušile njegovu učinkovitost i funkciju. Strogo slijedite upute u poglavlju HIGIJENSKA PRIPREMA.
	Dodaci nisu pravilno spojeni na uređaj.	Provjerite jeste li ispravno spojili zračni otvor uređaja i dodatke (vidi dijagram sastavljanja na naslovnici).
	Cijev je savijena, oštećena ili zgužvana	Odmotajte cijev i provjerite je li stisnuta ili probušena. Po potrebi ju zamijenite.
	Filter je prljav	Zamijenite filter
Uređaj je glasniji nego inače	Umetnuti filter	Pravilno umetnite filter u kućište

Ako nakon gornje provjere uređaj i dalje ne radi ispravno, preporučujemo da kontaktirate svog prodavača

MBJ?E?LHC

Kompresorska jedinica

 Sukladno Direktivi 2012/19/EU, simbol na opremi ukazuje da se oprema za odlaganje (isključujući pribor) smatra otpadom i stoga se mora 'posebno odložiti'. Stoga korisnik mora odneti ili dostaviti ovaj otpad posebnom centru za odlaganje, kako je uspostavljeno lokalnom vlašću ili ga predati prodavaču prilikom kupnje novog uređaja iste vrste. Pravilno razdvajanje otpada i daljnji postupci obrade, popravka i odlaganja potiču proizvodnju opreme od recikliranih materijala i smanjuju negativne ekološke i zdravstvene učinke uzrokovane nepravilnim odlaganjem. Neovlašteno korisničko odlaganje podrazumijeva primjenu upravnih sankcija prema zakonima Direktive 2012/19/EU zemalja članica ili zemlje u kojoj se odlaže proizvod.

Inhalator i dodaci

Odlagati kao komunalni otpad nakon čišćenja.

Pakiranje



Kutija proizvoda



Termo-sklupljiva folija za nebulizator i pribor



Cijev pakiranja proizvoda

M@?T@HCQR M MX@GJHLGK GLAGBCLRGK?

Serious events occurring in connection with this product must be reported immediately to the manufacturer and the competent authority.

An event is considered serious if it causes or may cause, directly or indirectly, death or an unforeseen serious deterioration in a person's state of health.

BPq?T?	L?BJCqLM R@HCJM
Gpq i _	?ec l agh_x _ pcesj_rmp l c n p m x t m b c s x b p _ t q r t s l c t g l M%K_jjcw Fmsqc* C_pjqdmpr Ac l r p c* C_pjqdmpr Rc p p _ a c * @ C + Bs` j g l 0 C+ k _ q j 8 b c t g a c q _ d c r w > f n p _ , q c
K_jr _	Hcbg l g a _ x _ k c b g a g l q i c s p c Ĩ _ h c J h c i m t g r _ q p c b q r t _ Q q p R c k g Ē _ k k g r @ s g j b g l e q * K _ j r _ J q d c Q a g c l a c q N _ p i Q _ l ū ū _ l l Q ū L 1 . . . C + k _ q j 8 b c t g a c q , k c b g a g l c q _ s r f m p g r w > e m t , k r

SIMBOLI NA UREĐAJU ILI AMBALAŽI



Medicinska oznaka CE sukladno propisu 2017/745 EU i naknadnim ažuriranjima



Uređaj klase II



Prije uporabe: pazite, provjerite upute za uporabu



Uključeno

Prilikom isključivanja jedinice, prekidač zaustavlja rad kompresora samo na jednoj od dvije faze napajanja



Isključeno



Bez ftalata i bisfenola



Broj modela



Temperaturna ograničenja



Ograničenja atmosferskog tlaka



Kód serije



Serijski broj uređaja



Proizvođač



Tip BF primijenjenog dijela



Naizmjenična struja



Pažnja

Zaštita kućišta: IP21. (Zaštićeno od čvrstih tijela većih od 12 mm.

IP21

Zaštićeno od pristupa prstom; Zaštićeno od vertikalno padajućih kapljica vode).



Pogledajte upute za uporabu



Ograničenja vlage



Datum proizvodnje



Jedinstveni identifikator uređaja



Medicinski uređaj



INFORMACIJE O OGRANIČENJIMA ILI INKOMPATIBILNOSTI S ODREĐENIM SUPSTANCAMA

- Interakcije: Materijali korišteni u uređaju su biokompatibilni te su usklađeni sa zakonskim propisima, međutim, nije moguće u potpunosti isključiti moguće alergijske reakcije
- Koristite lijek čim ga otvorite i ne ostavljajte ga u inhalatru; nakon završetka terapije, nemojte ostavljati lijek unutar nebulizatora, nego nastavite s higijenskom pripremom.

SPECIFIKACIJE KOMPRESORSKE JEDINICE

Model: P0513EM F400

Napon:	230V~ 50Hz 130VA
Maksimalni tlak:	1,8 ± 0,3 bara
Isporuka zraka kompresora:	približno 9 l/min
Glasnoća (na udaljenosti od 1 m):	približno 54 dB (A)
Rad:	Neprekidan
Dimenzije:	18(D) x 16,5(Š) x 13(V) cm

SPECIFIKACIJE NEBULIZATORA

Model: RF8-3

Raspršivač RF8 Dual Speed

Minimalni kapacitet:	2 ml
Maksimalni kapacitet:	8 ml

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE UREĐAJA

Model: P0513EM F400 kombiniran s RF8-3

Radni tlak (s raspršivačem): 0,8 bara

	Selektor brzine B2.2.3	
	Na poziciji Max	Na poziciji Min
⁽¹⁾ Otpuštanje:	0.40 ml/min (otprilike)	0.19 ml/min (otprilike)
⁽²⁾ MMAD:	4.48 µm	4.01 µm
⁽²⁾ Respirabilna frakcija < 5 µm (FPF):	55.5%	61.1%
(1) Podaci prikupljeni prema unutarnjem postupku tvrtke Flaem. (2) In vitro testiranje izvedeno od strane TÜV Rheinland Italia S.r.l. u suradnji sa Sveučilištem u Parmi. Više detalja dostupno na zahtjev.		

PRIMIENJENI DIJELOVI

Primijenjeni dijelovi tipa BF su: Pribor (B3, B4, B5) 1,100 kg

Težina:

UVJETI OKOLINE

Radni uvjeti:

Temperatura:	Između +10°C i +40°C
Relativna vlaga zraka:	Između 10% i 95%
Atmosferski tlak:	Između 69 KPa i 106 KPa

Uvjeti skladištenja i prijevoza:

Temperatura:	Između -25°C i +70°C
Relativna vlaga zraka:	Između 10% i 95%
Atmosferski tlak:	Između 69 KPa i 106 KPa

TRAJANJE

Model: P0513EM F400

(Kompresorska jedinica) Radni vijek 400 sati.

Model: RF8-3

(Raspršivač i pribor) Očekivani prosječni vijek trajanja je 1 godina, no preporučuje se zamjena raspršivača svakih 6 mjeseci tijekom intenzivne upotrebe (ili ranije ako je raspršivač začepljen) kako bi se osigurala maksimalna terapijska učinkovitost.

INFORMACIJE O OPREMI I MATERIJALIMA		
Pribor uključuje:		Informacije o materijalima
A -	Kompresorska jedinica - Model: P0513EM F400 A1 - Prekidač A2 – Zračni otvor A3 – Zračni filter A4 – Držač raspršivača A6 – kabel za napajanje	
	Inhalator i dodaci - Model: RF8-3 B1 – spojna cijev (kompresorska/inhalacijska jedinica) B2 - RF8 Raspršivač s dvije brzine B2.1 – Donji dio B2.2 – Gornji dio sa selektorom B2.2.1 – Gornji dio B2.2.2 – nosač prekidača selektora B2.2.3. – selektor brzine	
	B3 - Usnik	Polipropilen
	B4 – Dječja SoftTouch maska	Polipropilen +
	B5 - Za odrasle SoftTouch maska	termoplastični elastomeri
B -	VAŽNA NAPOMENA: Na ambalaži se nalazi identifikacijska naljepnica, uklonite je i zalijepite na predviđena mjesta na 2. stranici. Kod zamjene raspršivača i pribora, napravite isti postupak.	

UPUTE ZA UPORABU


Prije svake uporabe temeljito operite ruke i očistite uređaj kako je opisano u odjeljku "HIGIJENSKA PRIPREMA". Tijekom terapije se preporuča adekvatna zaštita od kapanja. Ovaj uređaj je pogodan za primjenu ljekovitih tvari (otopina i suspenzija) aerosolne primjene; prepisane od liječnika. Ako je neka tvar pregusta, potrebno ju je razrijediti odgovarajućom fiziološkom otopinom, prema liječničkom receptu.

1. Umetnite utikač kabela za napajanje (A6) u utičnicu koja odgovara naponu uređaja. Stavite ga tako da ga nije teško isključiti iz struje.
2. Sastavite gornji dio s prekidačem selektora, kako je prikazano u dijagrama spajanja B2.2.

Pažnja, nosač selektora (B2.2.2) mora savršeno stati u gornji dio (B2.2.1), kako bi uspjelo, morate poravnati strelicu na nosaču selektora s urezom spojke za dodatke, pogledajte sliku.

3. Ulijte propisani lijek u donji dio (B2.1). Umetnite gornji dio (B2.2) čašice u donji dio (B2.1) te zatvorite raspršivač okretanjem gornjeg dijela (B2.2) u smjeru kazaljke na satu.

4. Spojite dodatke prema "Dijagramu sastavljanja" na naslovnici.

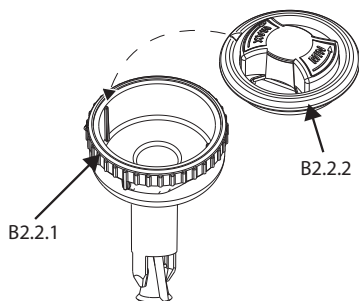


5. Udobno sjednite držeći raspršivač u ruci, stavite usnik na usta ili koristite nosnicu (ako je prisutna) ili masku. Ako koristite masku, stavite ju na lice kako je prikazano na slici (s ili bez upotrebe elastične trake).
6. Uključite uređaj pritiskom na prekidač (A1) i duboko udahnite i izdahnite; nakon udisaja, preporučuje se zadržati dah na trenutak kako bi se inhalirane aerosolne kapi mogle slegnuti. Zatim polako izdahnite.
7. Kada završite s korištenjem, isključite uređaj i isključite ga iz struje.




PAŽNJA: Ako se unutar cijevi nakon terapije (B1) stvori nakupina vlage, odvojite cijev od raspršivača i osušite ju pomoću ventilacije kompresora; ovime sprječavate moguće stvaranje plijesni unutar cijevi. Kako biste olakšali sastavljanje sastavne cijevi (B1) s kompresorskom jedinicom, istovremeno okrećite i umećite njen kraj, a za uklanjanje ga okrećite i izvlačite.

KAKO KORISTITI "RF8 DUAL SPEED" RASPRŠIVAČ S ODABIROM BRZINE

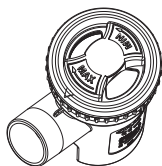


Kako biste ubrzali terapiju inhalacijom, okrenite selektor brzine (B2.2.3) u smjeru kazaljke na satu.

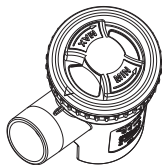


Kako biste terapiju inhalacijom učinili učinkovitijom, okrenite selektor brzine (B2.2.3) suprotno od smjera kazaljke na satu; u ovom slučaju postići ćete optimalnu primjenu lijeka, minimizirajući okolno raspršivanje lijeka.


Maske SoftTouch

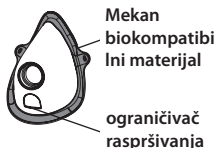

Maske SoftTouch imaju vanjski rub od mekanog, biokompatibilnog materijala koji osigurava optimalno pritanjanje uz lice, a također su opremljene inovativnim ograničivačem raspršivanja. Ove karakteristične značajke omogućuju veću koncentriranost lijeka kod pacijenta te ograničavaju njegovo raspršivanje.

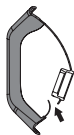

Prilikom udisanja, odjeljak koji djeluje kao Ograničivač raspršivanja savija se unutra u masku.

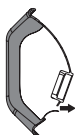

Prilikom izdisanja, odjeljak koji djeluje kao Ograničivač raspršivanja savija se na van.

HIGIJENSKA PRIPREMA

Isključite uređaj i isključite ga iz struje prije postupka higijenske pripreme.

Kompresorska jedinica (A) i vanjski dio cijevi (B1)

Koristite samo krpu namočenu antibakterijskim deterdžentom (neabrazivnim i bez otapala bilo koje vrste). **Nebulizator i dodaci**

Otvorite nebulizator okretanjem gornjeg dijela (B2.2) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, rastavite gornji dio (B2.2) kao što je prikazano u "Dijagramu povezivanja" u točki B2.2.

Zatim nastavite prema uputama u nastavku.

Čišćenje

Prije i nakon svake uporabe, očistite raspršivač i dodatke odabirom jedne od navedenih metoda u donjoj tablici te opisane u nastavku.

metoda A: Očistite pribor toplom pitkom vodom (približno 40°C) i blagim deterdžentom za pranje posuda (neabrazivnim).

metoda B: Očistite pribor u perilici posuđa u vrućem ciklusu (70°C).

metoda C: Očistite pribor uranjanjem u otopinu od 50% vode i 50% bijelog octa, a zatim temeljito isperite toplom pitkom vodom (približno 40°C).

Nakon čišćenja dodataka, snažno ih protresite i stavite na papirnati ručnik ili, alternativno, osušite vrućim zrakom (npr. sušilom za kosu).

Dezinfekcija

Nakon čišćenja raspršivača i pribora, dezinficirajte ih pomoću jedne navedenih metoda u donjoj tablici u nastavku. Svaku metodu možete izvesti ograničen broj puta (vidjeti sliku u tablici).

metoda A: Nabavite dezinficijens tipa elektrolitskog klorida (aktivni sastojak: natrijev hipoklorit), specifično za dezinfekciju, dostupan u svim ljekarnama.

Izvođenje:

- Napunite spremnik odgovarajuće veličine u koji stanu svi pojedinačni dijelovi koje treba dezinficirati otopinom pitke vode i dezinficijensa, prema naznačenom omjeru na pakiranju dezinficijensa.
- Potpuno uronite svaki pojedini dio u otopinu, pazite da se ne stvaraju mjehurići zraka. Ostavite dijelove uronjene u otopinu onoliko koliko je naznačeno na pakiranju dezinficijensa, uzevši u obzir odbranu koncentraciju za pripremu otopine.
- Izvadite dezinficirane komponente i temeljito ih isperite mlakom pitkom vodom.
- Bacite otopinu prema uputama proizvođača dezinficijensa.

metoda B: Dezinficirajte pribor kuhanjem u vodi 10 minuta; koristite demineraliziranu ili destiliranu vodu kako biste izbjegli taloženje kamenca.

metoda C: Dezinficirajte pribor u vrućem sterilizatoru za bočice (ne u mikrovalnoj pećnici). Strogo pratite upute sterilizatora. Kako bi dezinfekcija bila učinkovita, odaberite sterilizator koji ima radni ciklus od barem 6 minuta.

Nakon dezinfekcije pribora, snažno ga protresite i stavite na papirnati ručnik ili, alternativno, osušite vrućim zrakom (npr. sušilom za kosu).


Na kraju svake uporabe, spremite uređaj zajedno s priborom na suho mjesto bez prašine.

Tablica planiranih metoda / pribor za pacijente

Metoda Pribor		Čišćenje			Dezinfekcija		
		Metoda A	Metoda B	Metoda C	Metoda A	Metoda B	Metoda C
	B2.1	✓	✓	✓	✓ MAX 300 puta	✓ MAX 300 puta	✓ MAX 300 puta
	B2.2.1	✓	✓	✓	✓ MAX 300 puta	✓ MAX 300 puta	✓ MAX 300 puta
	B2.2.2	✓	✓	✓	✓ MAX 300 puta	✓ MAX 300 puta	✓ MAX 300 puta
	B2.2.3	✓	✓	✓	✓ MAX 300 puta	✓ MAX 300 puta	✓ MAX 300 puta
	B3	✓	✓	✓	✓ MAX 300 puta	✓ MAX 300 puta	✓ MAX 300 puta
	B4	✓	✓	✓	✓ MAX 300 puta	✓ MAX 300 puta	✓ MAX 300 puta
	B5	✓	✓	✓	✓ MAX 300 puta	✓ MAX 300 puta	✓ MAX 300 puta
✓: planirano /: nije planirano							

FILTRACIJA ZRAKA

Uređaj ima ekstrakcijski filter (A3) koji se mora zamijeniti kad se zaprlja ili promijeni boju. Ne perite, niti ponovno koristite isti filter. Redovita zamjena filtera je nužna za ispravan rad kompresora. Filter trebate redovito provjeravati. Za zamjenske filtere javite se svom prodavaču ili ovlaštenom servisnom centru. Kako biste zamijenili filter, izvucite ga kao što je prikazano na slici. Filter je dizajniran tako da uvijek stane u svoj nosač. Nemojte mijenjati filter tijekom rada uređaja. Koristite samo originalne Flaem dodatke ili rezervne dijelove, ne odgovaramo za korištenje neoriginalnih dijelova ili dodataka.

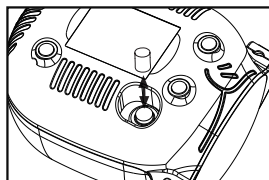

JAMSTVO

Jamstvo za ovaj proizvod vrijedi dvije (2) godine od dana kupnje. Distributer/Uvoznik se obvezuje da će tijekom ovog razdoblja uređaj biti besplatno popravljen, odnosno zamijenjen ako kvar nije moguće otkloniti. Ovo jamstvo ne pokriva kvarove uzrokovane nepravilnim korištenjem ili neovlaštenim pokušajem popravka uređaja u jamstvenom roku. Jamstvo ne pokriva potrošne dijelove priložene uz uređaj. Jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama. Jamstvo vrijedi na teritoriju Hrvatske.

DATUM KUPOVINE:

.....

PEČAT PRODAVATELJA I POTPIS PRODAVATELJA:

.....

U slučaju reklamacija obratite se na:

Zastupnik za Hrvatsku:

KVANTUM-TIM d.o.o.

Voćarska 6a

10437 Rakitje

TEL: 01 3637453,

FAX: 01 3637581,

E-mail: kvantum-tim@kvantum-tim.hr

WEB: www.kvantum-tim.hr

Servis za Hrvatsku:

KVANTUM-TIM d.o.o.

Voćarska 6a

10437 Rakitje

TEL: 01 3637453,

FAX: 01 3637581,

E-mail: servis@kvantum-tim.hr WEB:

www.kvantum-tim.hr



FLAEM NUOVA S.p.A.
Via Colli Storici, 221/223/225
25015 S. MARTINO DELLA BATTAGLIA
(Brescia) – ITALY
Tel. +39 030 9910168
www.flaem.it